



**Manuel d'utilisation
Modèle GR595**



Merci d'avoir acheté votre scooter Golden Eagle. Nous sommes honorés que vous ayez choisi Golden Technologies pour vos besoins en mobilité.

Golden Eagle modèle GR595 Liste

d'emballage standard :
1 Manuel d'utilisation
1 Panier avant
2 rétroviseurs (à visser)
1 Assemblage de siège
1 Fanion de sécurité
2 Clés
1 Chargeur de batterie
1 support pour téléphone portable
1 Compartiment de rangement arrière



AVERTISSEMENT

Nous vous demandons de lire entièrement ce manuel avant d'utiliser votre nouveau Golden Eagle. Golden Technologies, Inc. n'est pas et ne peut être tenu responsable de tout dommage ou blessure résultant d'une utilisation inappropriée ou dangereuse du scooter Golden Eagle. Golden Technologies, Inc. décline spécifiquement toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels pouvant survenir lors d'une utilisation non conforme aux lois ou ordonnances fédérales, nationales ou locales applicables.

Utilisation prévue : L'utilisation prévue du Golden Eagle est de fournir une mobilité aux personnes limitées à une position assise qui sont capables de conduire un scooter électrique.

TABLE DES MATIÈRES

I. INTRODUCTION.....	4-6
Caractéristiques et avantages.....	5
Accessoires pour le scooter Golden Eagle.	6
II. SÉCURITÉ.....	7-11
III. EMI/RFI	12
IV. VOTRE GOLDEN EAGLE.....	13
Spécification.....	14-15
V. FONCTIONNEMENT.....	16
Panneau de contrôle... ..	16-17
Options de contrôle.....	17
Siège... ..	18-19
Mode roue libre.....	20
VI. CONDUIRE VOTRE scooter GOLDEN EAGLE.....	21
Montage.....	21
Conduite de base.....	22
Diriger dans les espaces restreints... ..	23- 24
VII. DÉMONTAGE.....	25- 26
VIII. ASSEMBLAGE.....	27-28
IX. TRANSPORTER VOTRE GOLDEN EAGLE... ..	29
X. ENTRETIEN ET MAINTENANCE.....	30
Entretien de routine.....	30
NETTOYAGE VOTRE GOLDEN EAGLE 30	
Batteries et charge.....	31
Si votre GOLDEN EAGLE ne fonctionne pas.....	32
Gonflage correct des pneus.....	33
Diagnostics... ..	33-34
XI. GARANTIE	35-36
Carte de garantie/enregistrement.....	37

I. INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre nouveau scooter Golden Eagle. Le Golden Eagle associe une technologie de pointe à un design attrayant qui est également très fonctionnel dans le monde d'aujourd'hui. Chez Golden Technologies, Inc., nous savons que vous avez choisi un scooter qui vous offrira des années de fonctionnement fiable et qui améliorera votre qualité de vie en vous donnant la mobilité nécessaire pour mener une vie quotidienne active.

Bien que votre nouveau Golden Eagle soit à la fois convivial et conçu pour une maniabilité maximale, même dans les espaces les plus restreints, nous vous demandons de lire, de comprendre et de suivre toutes les instructions et suggestions de ce manuel avant d'utiliser votre fauteuil électrique pour la première fois. L'utilisation sécuritaire de votre nouveau scooter est très importante pour nous.

Si vous avez des difficultés à comprendre les instructions et les suggestions présentées dans ce manuel, ou si, pour quelque raison que ce soit, vous ne vous sentez pas capable d'effectuer les activités nécessaires au montage, au démontage, à l'utilisation ou à l'entretien de votre Golden Eagle, veuillez contacter votre fournisseur local de Golden Technologies, Inc. ou appelez le service d'assistance technique de Golden Technologies, Inc. au (800) 624-6374.

Golden Technologies, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation dangereuse ou inappropriée de l'un de nos produits de mobilité personnelle. En outre, Golden Technologies, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages corporels ou matériels résultant d'une tentative de suivre les instructions, les suggestions et les directives présentées dans ce manuel d'utilisation.

Notre département de recherche et développement, notre département de contrôle de la qualité et notre département d'ingénierie ont utilisé les spécifications et les informations de conception les plus récentes pour fabriquer votre Golden Eagle. Golden Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à sa gamme de produits lorsque celles-ci s'avèrent utiles ou nécessaires. Si des modifications sont apportées à notre gamme de produits, il peut y avoir des différences mineures entre le produit que vous avez acheté et les illustrations et instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.

Veuillez remplir et envoyer la carte d'enregistrement de la garantie ci-jointe. Vous pouvez également vous inscrire à l'adresse suivante www.goldentech.com. Golden Technologies, Inc. aimerait connaître la fiabilité de votre Golden Eagle et le confort de mobilité qu'il vous a procuré. Nous aimerions également connaître le service que vous avez reçu de votre fournisseur ou représentant local de Golden Technologies, Inc.

Golden Technologies, Inc.
401 Bridge
Old Forge, PA 18518

Téléphone : (570) 451-7477
Street Fax : (570) 451-7494
Numéro vert : (800) 624-6374

Pour plus d'informations sur nos produits et services ou pour nous faire part de vos commentaires, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : www.goldentech.com

I. INTRODUCTION

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Votre scooter Golden Eagle a été conçu pour votre confort. Il a également été conçu pour être un moyen de transport sûr lorsque les consignes de sécurité et d'utilisation sont respectées. Veuillez passer en revue les caractéristiques et les avantages de certains composants du scooter Golden Eagle ci-dessous.

Barre franche :

La poignée facile à utiliser offre de multiples réglages pour trouver la position de conduite la plus confortable. Le port de chargeur, le port USB et les connecteurs montés sur le côté facilitent la sélection de la musique.

Stockage :

Le scooter Golden Eagle est équipé en série d'un panier de rangement amovible en plastique et d'un compartiment de rangement à l'arrière.

Lumières : Phares (et feux arrière) :

De série, les phares, les feux arrière et les clignotants sont dotés d'ampoules LED lumineuses et durables.

Pare-chocs :

Le scooter Golden Eagle est équipé en série de pare-chocs avant et arrière rembourrés, conçus pour protéger les carénages avant et arrière des rayures et des fissures.

Panneau de contrôle :

Écran LCD facile à lire avec compteur de vitesse, compteur kilométrique et jauge de batterie. Contrôle de haut en bas : Bouton de réglage de la vitesse surdimensionné, interrupteur de phare, bouton de klaxon, clignotants gauche et droit et interrupteur de clignotant.

Poignée de barre franche

Delta : Les repose-mains sont recouverts de caoutchouc pour plus de confort et il y a deux leviers de commande d'accélérateur pour faciliter l'utilisation par les droitiers ou les gauchers. De plus, les deux rétroviseurs et le support pour téléphone portable font partie des caractéristiques standard.



Siège de capitaine à dossier haut :

Le siège comporte des accoudoirs réglables en angle et en largeur, ainsi qu'une assise coulissante permettant de trouver la position la plus confortable et de faciliter les transferts.

Tapis de sol :

Le Golden Eagle est équipé en série d'un tapis de sol amovible en caoutchouc antidérapant.

Pneumatiques :

Le Golden Eagle est équipé en standard de pneus gonflés à l'air pour une conduite plus souple.

Accès facile à la batterie :

Situées sous le siège, les batteries sont accessibles en retirant simplement le couvercle du compartiment à batteries.

Figure 1. Golden Eagle (Modèle : GR595)
Caractéristiques

I. INTRODUCTION

ACCESSOIRES POUR LE SCOOTER GOLDEN EAGLE :

Il y'a de nombreux accessoires disponibles pour votre scooter Golden Eagle. Veuillez contacter votre fournisseur agréé de Golden Technologies pour plus d'informations ou pour commander.

- Tube porte-canne
- Porte-canne quadruple
- Porte déambulateur
- Support de bouteille d'oxygène
- Porte-gobelet
- Mallette de voyage
- Porte-béquille pour avant-bras
- Fanion de sécurité
- Housse pour scooter
- Panier arrière
- Ceinture de sécurité
- Support pour téléphone portable
- Compartiment de rangement

*Certains accessoires nécessitent un support de montage ou des clips de montage. Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur si l'accessoire que vous souhaitez commander nécessite un support de montage ou des clips de montage.

Consignes de sécurité

Les symboles ci-dessous sont utilisés dans le manuel d'utilisation et/ou sur le produit pour identifier les avertissements et vous communiquer des informations importantes en matière de sécurité. Assurez-vous de les lire et de les comprendre entièrement.



AVERTISSEMENTS ! Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves. Cette icône est représentée par un symbole noir sur un triangle jaune avec une bordure noire.



OBLIGATOIRE ! Le non-respect des mesures obligatoires peut entraîner des blessures corporelles et/ou endommager l'équipement. Cette icône est représentée par un symbole blanc sur un point bleu avec une bordure blanche.



INTERDIT ! Indiquez une (des) action(s) qui ne doit (doivent) en aucun cas être effectuée(s). Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles et/ou endommager l'équipement. Cette icône est représentée par un cercle rouge et une barre rouge.

Symboles de sécurité

Les symboles ci-dessous identifient les avertissements, les actions obligatoires et les actions interdites. Elles figurent dans le manuel d'utilisation et/ou sur le produit. Assurez-vous de bien comprendre toutes les étiquettes de sécurité avant d'utiliser le produit. Ne pas retirer les étiquettes de sécurité du produit.



Lisez et respectez le manuel d'utilisation !

Utilisez uniquement des batteries au lithium-ion



Risques d'explosion !



Éviter les émetteurs !



Utilisation à l'intérieur uniquement !



Surface chaude !



Risque de pincement/écrasement



Ne pas jeter à la poubelle !



Recyclable



Risque électrique !



Produits chimiques corrosifs à l'intérieur de la batterie !



N'utilisez pas d'appareils électroniques personnels !

II. SÉCURITÉ

Votre Golden Eagle est un véhicule de mobilité personnelle fonctionnant sur batterie. Veuillez faire preuve de prudence et d'attention lorsque vous l'utilisez. La conduite prudente et réfléchie de votre Golden Eagle contribuera à assurer votre sécurité personnelle et celle des autres personnes.



OBLIGATOIRE ! Lisez entièrement et comprenez ce manuel d'utilisation avant d'assembler, d'utiliser, de transporter ou de désassembler votre scooter Golden Eagle.

NOTICE

Avant d'apprendre à utiliser votre Golden Eagle, demandez à votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc. de déterminer s'il est souhaitable que vous vous entraîniez à monter et à descendre de votre Golden Eagle et à l'utiliser en présence d'un accompagnateur.

AVANT DE MONTER SUR VOTRE GOLDEN EAGLE

- Vérifier que l'alimentation est bien coupée. Voir la section V. "Fonctionnement" de ce manuel. Vous éviterez ainsi d'activer accidentellement les commandes des palettes et de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Vérifiez que le levier de la roue libre de votre Golden Eagle est en position engagée. Voir la section V. « Fonctionnement » de ce manuel.
- Relevez les accoudoirs.



WARNING

Lorsque vous montez ou descendez de votre Golden Eagle, gardez votre poids vers le milieu de la plate-forme. Le fait de placer tout ou partie de votre poids sur le bord de la plate-forme peut provoquer une situation instable.

MONTER SUR VOTRE GOLDEN EAGLE

- Positionnez le siège pour pouvoir monter facilement et en toute sécurité. Veillez à ce que le siège soit orienté vers l'avant. Voir section V. "Fonctionnement"
- Remettez la barre franche en position verticale si nécessaire.
- Placez soigneusement un pied sur le centre approximatif du pont et asseyez-vous confortablement et solidement sur le siège.
- Rabattez l'accoudoir ou les accoudoirs.

DESCENDRE DE VOTRE GOLDEN EAGLE

- Assurez-vous que l'alimentation est coupée et que la clé est retirée.
- Remettez la barre franche en position verticale
- Relevez les accoudoirs.
- Placez prudemment un pied sur le sol, transférez votre poids sur cette jambe et mettez-vous lentement en position debout.
- Éloignez-vous du scooter.

POIDS MAXIMUM

Votre Golden Eagle a été conçu pour une charge utile maximale (passager et tout ce qui est transporté sur le fauteuil roulant électrique) de 500 livres. Le dépassement du poids maximum autorisé annule la garantie.



WARNING

Si vous dépassez le poids maximal autorisé, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

II.

CONDUITE EN PENTE

- Pour une stabilité maximale, penchez-vous vers l'avant dans le siège de votre Golden Eagle lorsque vous montez des rampes, des pentes, des bordures de trottoir ou toute autre élévation basse. Voir figure 2.
- Conduisez avec prudence lorsque vous tentez de négocier une pente, même une rampe d'accès pour handicapés.
- Il faut **toujours** monter ou descendre une pente en conduisant en ligne droite vers le haut ou vers le bas. Voir figure 2.
- **Ne traversez pas** ou ne conduisez pas sur la face d'une pente, dans quelque direction que ce soit. Voir figure 3.
- **N'essayez pas** de négocier une pente couverte de neige, de glace, d'herbe coupée ou mouillée, de feuilles ou de toute autre matière potentiellement dangereuse.
- Ne conduisez **pas** votre scooter en marche arrière sur une pente.
- Essayez de garder votre Golden Eagle en mouvement lorsque vous montez une pente. Si vous vous arrêtez, redémarrez et accélérez lentement et prudemment.
- **N'essayez pas** de descendre ou de monter une pente dont l'inclinaison est supérieure à celle recommandée.

***L'inclinaison maximale recommandée pour le Golden Eagle est de 7.5°**



Figure 2. Monter une pente



Figure 3. Traverser une pente



WARNING

Si, alors que vous descendez une pente, votre scooter commence à avancer plus vite que vous ne le pensez sûr, relâchez le levier de commande d'accélérateur et laissez votre Golden Eagle s'arrêter. Lorsque vous sentez que vous avez de nouveau le contrôle de votre scooter, poussez le levier de commande d'accélérateur vers l'avant et continuez à descendre le reste de la pente en toute sécurité.

DESCENTE D'UNE PENTE

- Réglage de la vitesse inférieure
- Chaque fois qu'il est possible de le faire en toute sécurité, descendez en marche avant toute rampe, faible élévation ou inclinaison.

II.

Golden Technologies, Inc. ne recommande pas que vous conduisiez votre scooter en marche arrière sur une pente, une rampe, un trottoir ou une faible élévation. Le fait de reculer sur une pente peut créer une situation très dangereuse. S'il est nécessaire de redescendre une pente, suivez l'une des deux procédures suivantes.

CAUTION

Lorsque vous utilisez l'une des procédures suivantes pour descendre une pente, Golden Technologies, Inc. vous conseille vivement de vous faire aider par une autre personne.

Procédure 1 - Sous tension

1. Mettez l'interrupteur à clé en position "Off". Voir section V. « Fonctionnement. »
2. Démontez votre Golden Eagle.
3. Mettez l'interrupteur à clé en position "On". Voir section V. « Fonctionnement. »
4. En vous tenant à côté de votre scooter, actionnez prudemment les commandes à la vitesse la plus basse. Voir section V. « Fonctionnement. »
5. Faites reculer lentement et prudemment votre scooter sur la pente.
6. Remontez avec précaution votre Golden Eagle et reprenez le cours normal de vos activités.



WARNING

Lorsque votre scooter est en roue libre, le frein de stationnement est relâché. Si les batteries sont déchargées, le système de freinage du moteur ne fonctionnera pas. Le poids du scooter sur une pente peut vous faire perdre le contrôle du scooter. Si vous ne vous sentez pas capable de contrôler manuellement votre scooter sur une pente, demandez de l'aide ou n'essayez pas d'utiliser cette procédure.

Procédure 2 - Urgence (Hors tension)

1. Mettez l'interrupteur à clé en position "Off". Voir section V. « Fonctionnement. »
2. Démontez votre Golden Eagle.
3. Placez le levier de la roue libre en position "débrayée"
4. Tout en restant à côté du scooter, manœuvrez manuellement et avec précaution le scooter pour descendre la pente.
5. Lorsque vous avez atteint une surface plane au bas de la pente, placez le levier de la roue libre en position engagée. Voir la figure 11 à la page 20.
6. Pour rétablir le courant, placez l'interrupteur à clé en position "On". Voir section V. « Fonctionnement. »

Système de freinage du moteur

Votre scooter est équipé d'un système qui utilise le moteur pour faciliter le freinage. Ce système de frein moteur est conçu pour fonctionner lorsque la clé est en position marche ou arrêt.

Lorsque l'interrupteur à clé est en position marche, que la roue libre est en position engagée et que le scooter est sous tension, le moteur aidera à ralentir le scooter dès que vous enlèverez votre main de l'accélérateur.

Lorsque l'interrupteur à clé est en position d'arrêt et que le levier de roue libre est en position désengagée, le système de frein moteur vous empêchera de rouler trop vite (par exemple, en descendant une pente).

II.

Vous pouvez vous en rendre compte en poussant le scooter. Le scooter se déplace librement jusqu'à ce que vous atteigniez une certaine vitesse. Vous rencontrerez alors une certaine résistance lorsque le système de freinage du moteur sera activé.

MÉDICATIONS

Veillez toujours consulter votre médecin pour déterminer si les médicaments que vous prenez peuvent affecter votre jugement et/ou votre capacité à conduire votre Golden Eagle. Vérifiez également avec votre médecin si vous êtes physiquement capable de conduire un scooter.



WARNING

Ne connectez pas et ne permettez à personne d'autre qu'un fournisseur autorisé de Golden Technologies, Inc. de connecter tout dispositif électrique ou mécanique à votre Golden Eagle. Les accessoires non autorisés annulent la garantie et peuvent provoquer des blessures.

NOTICE

N'oubliez pas qu'à bord de votre Golden Eagle, vous êtes un piéton motorisé. Vous devez observer et respecter toutes les règles et réglementations applicables aux piétons dans la région où vous circulez.

Utilisez souvent votre scooter Golden Eagle et élargissez les horizons de votre vie quotidienne. Plus votre Golden Eagle vous apportera de mobilité, plus vous serez heureux, et plus nous serons satisfaits chez Golden Technologies, Inc. Toutefois, comme pour toute chose, en particulier les véhicules à moteur, le respect de quelques règles et considérations de sécurité vous permettra d'utiliser votre scooter en toute sécurité. Veuillez donc suivre les règles ci-dessous.

RÈGLES D'UTILISATION ET AUTRES CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ



WARNING

Lisez entièrement et comprenez ce manuel d'utilisation avant d'assembler, d'utiliser, de transporter ou de démonter votre Golden Eagle.

- Veillez à **toujours** utiliser votre Golden Eagle de manière réfléchie, prudente et en toute sécurité.
- **N'essayez pas** d'utiliser votre Golden Eagle sur un escalator. Utilisez toujours un ascenseur.
- **Ne** transportez en **aucun** cas des passagers.
- **Ne** montez ou ne démontez **pas** de votre Golden Eagle si le frein n'est pas engagé.
- Veillez **toujours** à ce que l'interrupteur à clé soit en position "Off" avant de monter ou de démonter votre scooter.
- Ne faites **pas** reculer votre Golden Eagle sur une pente ou une surface irrégulière.
- Ne tournez **pas** votre scooter brusquement à pleine vitesse.
- Veillez toujours à ce que le siège soit verrouillé en position à la route avant d'utiliser votre Golden Eagle.
- Veillez à toujours vous arrêter complètement avant de passer de la marche avant à la marche arrière ou de la marche arrière à la marche avant.
- **N'utilisez pas** votre Golden Eagle dans des endroits où vous ne pourriez pas marcher en toute sécurité ou légalement.
- **Ne** montez **pas** sur des rampes ou des bordures qui dépassent la capacité de votre scooter.
- Il **faut toujours** aborder les bordures et les plans inclinés en ligne droite.
- Soyez **toujours** conscient et prudent à proximité des points de pincement mécaniques,

II.

en particulier lors du montage et du démontage de votre scooter.

- Ne vous asseyez jamais sur votre Golden Eagle lorsqu'il est transporté.
- Attachez toujours votre Golden Eagle solidement avec un système d'arrimage approuvé lorsque vous transportez votre scooter.
- Attachez toujours le siège ou enlevez-le pendant le transport à l'extérieur.
- N'utilisez **jamais** votre scooter s'il ne fonctionne pas correctement.

RÈGLES D'UTILISATION ET AUTRES CONSIDÉRATIONS DE SÉCURITÉ - suite



WARNING

- Soyez **toujours** prudent lorsque vous conduisez sur des surfaces molles ou irrégulières telles que l'herbe ou le gravier. Soyez également prudent sur les terrasses dépourvues de garde-corps.
- Ne conduisez **jamais** sur la chaussée, sauf si vous devez traverser la rue.
- Veillez à **toujours** traverser les rues aux intersections et à emprunter les passages piétons ou l'itinéraire le plus direct, en vous assurant que votre chemin est dégagé et que vous êtes visible de la circulation automobile.
- **Ne faites jamais** monter ou descendre votre Golden Eagle sur une marche ou un trottoir dont la hauteur est supérieure à la garde au sol indiquée dans le tableau des spécifications (voir pages 14-15).
- Ne reculez **jamais** en montant ou en descendant une marche ou une bordure.
- **Ne conduisez pas** votre Golden Eagle sur du verglas ou du sel.
- N'utilisez **jamais** votre Golden Eagle si vous êtes sous l'influence de l'alcool.
- N'utilisez **pas** et ne stockez pas votre Golden Eagle dans un endroit où il sera exposé à la pluie, à la neige, au brouillard et à des températures inférieures au point de congélation.
- Veillez à ce que vos pneus soient **toujours** correctement gonflés.

CAUTION



Ne placez pas de liquides chauds dans le porte-bouteille. Le liquide chaud pourrait se répandre pendant l'utilisation du scooter et vous brûler.

CAUTION

Soyez prudent lorsque vous conduisez votre scooter Golden Eagle sur un terrain accidenté ou irrégulier, sur de la terre molle, de l'herbe profonde et/ou du gravier meuble.



WARNING

Les pneus surgonflés sont susceptibles d'éclater et de provoquer des blessures graves. Des pneus sous-gonflés entraîneront une perte significative de la portée opérationnelle et une surchauffe de la carte de commande du moteur.



WARNING

Si vous rencontrez un problème dans le fonctionnement de votre appareil

II.

de mobilité, tel qu'un problème mécanique ou électrique, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Débranchez les batteries, puis contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté votre appareil de mobilité pour qu'il évalue le problème et le répare si nécessaire.

III. EMI/RFI

Le développement rapide de l'électronique, en particulier dans le domaine des communications, a saturé notre environnement d'ondes électromagnétiques (radio) émises par les émetteurs de télévision, les téléphones cellulaires, les radios communautaires (CB), les radios amateurs, les liaisons informatiques sans fil, les émetteurs de micro-ondes, les émetteurs de radiomessagerie, etc. Ces ondes électromagnétiques (EM) sont invisibles et leur intensité augmente à mesure que l'on se rapproche de la source d'émission. Lorsque ces ondes d'énergie agissent sur des appareils électriques et provoquent un dysfonctionnement ou un fonctionnement erratique ou incontrôlé, on parle d'interférences électromagnétiques (EMI) ou d'interférences de radiofréquences (RFI).

EMI/RFI ET VOTRE GOLDEN EAGLE

Tous les véhicules électriques, y compris les scooters, sont susceptibles de subir des interférences électromagnétiques et des interférences de fréquence radio (EMI/RFI). Cette interférence pourrait entraîner un mouvement anormal et involontaire de votre Golden Eagle.



WARNING

Un mouvement involontaire ou un relâchement des freins peut provoquer un accident ou des blessures.

La FDA a déterminé que chaque marque et modèle de scooter peut résister aux EMI/RFI à un certain niveau. Plus le niveau de résistance est élevé, plus le degré de protection contre les EMI/RFI est important, mesuré en volts par mètre (V/m). La FDA a également déterminé que la technologie actuelle est capable de fournir une résistance de 20 V/m aux EMI/RFI, ce qui offrirait une protection utile contre les sources courantes d'interférence. Ce produit a été testé et a passé un niveau d'immunité de 20 V/m.

RECOMMANDATIONS EMI/RFI



INTERDIT ! N'allumez pas et n'utilisez pas d'appareils de communication électronique portatifs tels que des téléphones cellulaires, des talkies-walkies ou des radios CB lorsque votre fauteuil électrique est en marche.

- Soyez attentif à tout émetteur proche (radio, télévision, micro-ondes, etc.) sur votre itinéraire prévu et évitez d'utiliser votre scooter à proximité de l'un de ces émetteurs.
- Éteignez l'appareil si votre Golden Eagle doit rester dans une position stationnaire pendant un certain temps.
- Soyez conscient que l'ajout d'accessoires ou de composants ou la modification de votre scooter peut le rendre plus sensible à l'EMI/RFI.
- En cas de mouvement involontaire ou de relâchement des de stationnement freins, éteignez votre scooter dès que vous pouvez le faire en toute sécurité.
- Signalez tout incident de mouvement involontaire ou de défaillance du frein de stationnement au service technique de Golden Technologies, Inc. Au service technique au (800) 624-6374.



WARNING

Éteignez votre scooter dès que cela est possible en toute sécurité si un mouvement involontaire ou incontrôlable se produit ou si un relâchement involontaire des freins se produit.

IV. YOUR VOTRE



Porte-bouteille



Levier de rotation du siège
&
Levier de coulissement du siège



Barre franchhe



Levier de roue libre

Figure 4. Votre Golden Eagle (Modèle GR595)

POUR VOS DOSSIERS

Veuillez remplir les informations ci-dessous concernant votre Golden Eagle. Ces informations vous seront utiles si vous devez contacter Golden Technologies, Inc. au sujet de votre scooter.

Modèle _____ Numéro de série _____

Date d'achat _____

Nom du prestataire _____

Entreprise _____

Adresse _____

Ville _____ État _____ Code postal _____

N'oubliez pas de remplir et de renvoyer la carte d'enregistrement de la garantie qui se trouve au dos de ce manuel.

IV. YOUR VOTRE

Spécification	GR595
Code de l'assurance-maladie	Non codé
Capacité de poids	500 lbs.
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	8 mph
Plage de fonctionnement 1	32 miles
Garde au sol jusqu'au centre du pont	5"
Garde au sol de la boîte de vitesses/du moteur	3,5"
Rayon de braquage	69"
Type de batteries	2-NF22 ou 2-75 AH
Couleurs	Rouge
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Frein à main mécanique	Non
Chargeur	Externe
Contrôleur	140 Amp
Dimensions	
Longueur	56,5"
Largeur	27"
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	49" – 50"
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	57" – 62,5"
Du sol au sommet du siège	27" – 28"
Du sol au sommet du pont	7,25"
Du pont au sommet du siège	19,75" – 20,75"
Nombre de positions en hauteur du siège	2
Taille des incréments	1"
Essieu avant à essieu arrière	40"
Poids de l'unité : (assemblé)	302.5 lbs.
Base	179 lbs.
Siège avec accoudoirs	49,5 lbs.
Batteries	37 lbs./ea. (NF22) 52 lbs./ea. (75AH)

IV. YOUR VOTRE

Spécification	GR595
Pneus :	Pneumatique
Avant ³	13"
Arrière ³	13"
Roues arrière anti-basculement	3"
Siège standard :	Capitaine à dossier haut :
Dossier du Capitaine	Standard
Hauteur du dossier (sans appui-tête)	23,75"
Hauteur du dossier (avec appui-tête)	30,75" – 36,25"
Largeur x Profondeur	20" x 18"
Couleur	Noir
Garantie :	
Cadre	5 ans
Groupe motopropulseur	2 ans
Électronique 2	2 ans
Batteries	1 ans

*** Remarque :**

1. L'autonomie de la batterie est de 200 livres et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface d'entraînement, du terrain et du type de batterie.
2. La garantie de l'électronique exclut les batteries.
3. Gonfler les pneus à 35 psi.

La documentation est à jour au moment de l'impression. Golden Technologies se réserve le droit d'apporter des modifications au produit ou à la documentation à tout moment

V. FONCTIONNEMENT



Figure 5. Panneau de commande de la barre franche Delta avec écran LCD

PANNEAU DE CONTRÔLE

Cadran de réglage de la vitesse

- La molette de réglage de la vitesse vous permet de présélectionner la vitesse maximale de votre Golden Eagle. Voir figure 5.
- Tournez le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour faire fonctionner votre scooter à la vitesse la plus basse.
- Tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la vitesse de fonctionnement de votre scooter.
- Nous vous recommandons de choisir une vitesse à laquelle vous vous sentez à l'aise, en sécurité et en contrôle de votre Golden Eagle.

Interrupteur à clé

Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre l'alimentation de votre Golden Eagle. Voir figure 6.

- Insérer la clé dans le contacteur à clé.
- Tournez la clé de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre pour mettre votre scooter en marche. L'écran LCD (Affichage à cristaux liquides) s'allume pour indiquer que l'appareil est sous tension.
- Tournez la clé en position verticale pour couper l'alimentation de votre scooter.

⚠ CAUTION

Assurez-vous toujours que la clé est retirée de l'interrupteur à clé avant de monter ou de descendre de votre Golden Eagle ou avant d'abaisser complètement la barre franche.



Figure 6. Interrupteur à clé

Bouton de klaxon :

Appuyez ce bouton pour klaxonner. Voir figure 5.

Voltmètre DC pour batterie

V. FONCTIONNEMENT

Ce voltmètre (voir figure 5) indique la tension des batteries de votre Golden Eagle.

- Des barres pleines indiquent une charge complète des batteries.
- Des barres plus petites indiquent une diminution de la charge restante des batteries.
- Une barre indique que les batteries ont une charge minimale restante.

Voir la section X. "Entretien et maintenance" pour les instructions concernant le chargement des batteries.

Port de charge USB et Bluetooth

Connectez l'appareil à charger au port USB. Voir figure 7.



Figure 7. USB et Bluetooth

Comment connecter votre Bluetooth ?

1. Ouvrez Bluetooth sur votre téléphone. 
2. Recherchez et trouvez l'équipement nommé "Golden".  Golden 
3. Sélectionnez "Golden" pour le connecter à votre téléphone. Vous pouvez maintenant utiliser votre téléphone.

USB Avis de non-responsabilité : Le port de charge USB fourni est uniquement destiné à être utilisé avec des appareils intelligents appropriés tels que des téléphones ou des tablettes. Veuillez vous référer aux exigences de charge du fabricant de l'appareil avant de l'utiliser. Golden Technologies exclut toute responsabilité pour tout dommage ou perte de données concernant le dispositif de chargement sur un ordinateur ou un autre appareil électronique connecté au port USB.

Levier de commande de l'accélérateur de la barre franche Delta

La barre franche Delta vous permet d'utiliser une seule main (droite ou gauche) pour commander à la fois la vitesse et la direction de votre Golden Eagle. Ce système de levier à centrage automatique contrôle la vitesse de votre Golden Eagle (jusqu'à la vitesse maximale réglée par la molette de réglage de la vitesse) ainsi que sa direction avant et arrière. Voir figure 5.

Pour aller de l'avant, utilisez l'un ou l'autre des moyens suivants :

- Utiliser les doigts de la main droite pour tirer vers l'arrière le côté droit du levier de commande de l'accélérateur.
- Utilisez votre pouce gauche pour pousser le côté gauche du levier de commande de l'accélérateur.

CAUTION

Arrêtez toujours votre Golden Eagle avant de passer de la marche avant à la marche arrière ou de la marche arrière à la marche avant.

Pour conduire en marche arrière, utilisez l'une ou l'autre des méthodes suivantes :

- Utilisez les doigts de la main gauche pour tirer vers l'arrière le côté gauche du levier de commande de l'accélérateur.
- Utilisez votre pouce droit pour pousser le côté droit du levier de contrôle de l'accélérateur.

Lorsque le levier de commande de l'accélérateur est complètement relâché, il revient automatiquement à la position centrale "stop" et engage les freins de votre scooter, ce qui vous permet de vous arrêter complètement. Vous entendrez un "clic" lorsque le frein de stationnement s'enclenchera.

Options de contrôle.

Golden Technologies, Inc. a pris des dispositions pour répondre aux besoins individuels et aux capacités des utilisateurs du Golden Eagle.

Votre fournisseur autorisé Golden Technologies, Inc. peut inverser les commandes du levier de

V. FONCTIONNEMENT

contrôle de l'accélérateur de sorte que lorsque vous tirez sur le côté gauche du levier, votre scooter se déplace dans la direction avant, et lorsque vous tirez sur le côté droit du levier, votre scooter se déplace dans la direction arrière.

POIGNÉE DE BARRE FRANCHE DELTA :

La barre franche de votre scooter Golden Eagle est équipée d'une poignée qui vous permet de régler l'angle d'inclinaison à l'infini. Pour régler la barre franche à votre pouvoir, suivez les instructions suivantes.

1. Saisissez d'une main la poignée de la barre franche.
2. Utilisez l'autre main pour saisir et pousser vers le haut le levier de réglage de la barre franche.
3. Déplacez la barre franche vers l'avant ou vers l'arrière dans la position souhaitée.
4. Relâchez le levier de réglage pour verrouiller la barre franche en place.

SIEGE :

Accoudoirs relevables

Tirez sur l'extrémité de l'un des accoudoirs pour le faire basculer vers le haut afin de faciliter le transfert sur ou hors de votre Golden Eagle. Voir figure 8.



WARNING Ne poussez pas avec une force excessive sur le bras et n'utilisez pas l'accoudoir pour soutenir votre poids lorsque vous essayez de sortir du scooter.

Angle de l'accoudoir

Pour augmenter l'angle de l'accoudoir, tournez la vis d'angle de l'accoudoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Pour réduire l'angle de l'accoudoir, tournez la vis d'angle de l'accoudoir dans le sens des aiguilles d'une montre.

Hauteur de l'appui-tête

Appuyez sur le bouton pour régler la hauteur de l'appui-tête.

Angle du dossier

Soulevez la poignée située sur le côté gauche du siège pour régler l'angle du dossier.

Remarque : Le dossier peut être rabattu pour réduire la hauteur de la chaise pendant le transport.



WARNING Le fait de soulever la poignée d'inclinaison du dossier permet de rabattre rapidement le dossier du siège. Veillez à ce que vous ne soyez pas en contact avec le dossier du siège ou tenez le dossier du siège avec votre main opposée pendant le réglage de l'angle du dossier du siège.

Levier de glissement du siège

1. Soulevez le levier et, tout en le maintenant, faites glisser le siège jusqu'à une position confortable.
2. Relâchez le levier pour verrouiller le siège en place.

Remarque : Le levier est situé sur le côté droit du siège, vers l'avant du siège.

V. FONCTIONNEMENT



Figure 8. Réglage du confort des sièges

V. FONCTIONNEMENT



Figure 9 : Réglage de la rotation du siège

Levier de rotation du siège

Le siège peut être tourné à 360° et bloqué à n'importe quelle position de 45°.

1. Poussez le levier de rotation du siège vers l'avant et tournez le siège dans la position souhaitée. Voir figure 9.
2. Relâchez la poignée pour bloquer le siège à n'importe quelle position de 45°.



Figure 10

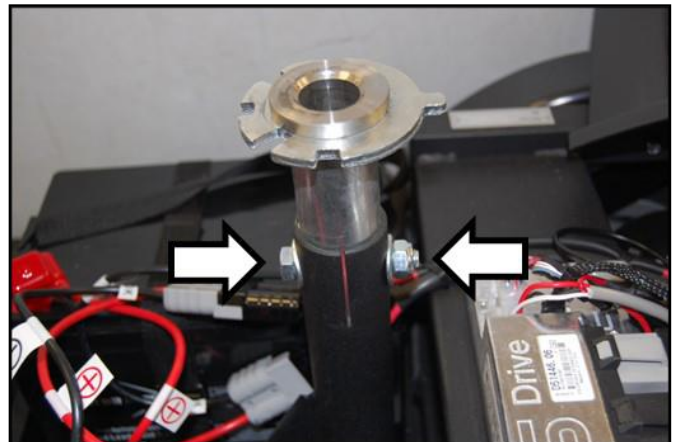


Figure 11 : Écrou et boulon de tige de selle

Réglage de la hauteur de la selle

Pour régler la hauteur du siège :

1. Rabattez le dossier du siège, saisissez le siège sur les côtés opposés et, avec une prise ferme, tirez le siège tout droit vers le haut et hors du socle du siège. Voir figure 10.
2. Retirez l'écrou et le boulon qui maintiennent la tige de selle dans le socle de la selle. Voir figure 11.
3. Positionnez la tige du siège à la hauteur souhaitée en alignant les trous de la tige du siège et du socle du siège.
4. Réinstallez l'écrou et le boulon.
5. Placez le dossier de la selle sur la tige de selle et poussez vers le bas pour verrouiller la selle.



WARNING

Assurez-vous que le siège est bien verrouillé en place avant d'utiliser le scooter.

V. FONCTIONNEMENT



WARNING

Ne vous asseyez jamais sur votre Golden Eagle en roue libre.



WARNING

Ne désengagez jamais le frein de stationnement pendant que vous utilisez votre Golden Eagle.



WARNING

Veillez toujours à ce que le frein de stationnement de votre scooter soit engagé avant d'insérer la clé dans le commutateur à clé et de le mettre en position de marche.

MODE ROUE LIBRE

Votre Golden Eagle est équipé d'un levier de roue libre qui peut mettre votre scooter en mode roue libre ou non.

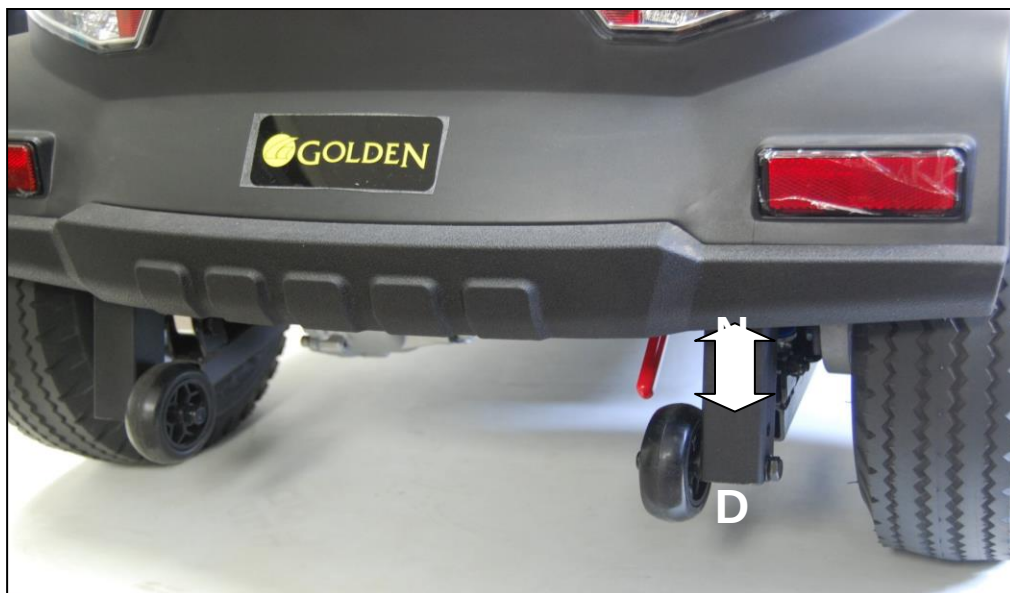


Figure 12 : Levier de roue libre

Pour désengager le frein de parc et mettre votre scooter en roue libre :

Tirez le levier de la roue libre vers le haut en direction de la lettre N (position neutre). Voir figure 12.

Pour enclencher le frein et sortir votre scooter du mode roue libre :

Poussez le levier de la roue libre vers le bas en direction de la lettre D (position d'entraînement). Voir figure 12.

NOTICE

En poussant le scooter trop rapidement en roue libre, le moteur agira comme un générateur et le scooter deviendra difficile à pousser. Roulez lentement en roue libre.

VI. CONDUIRE VOTRE GOLDEN EAGLE

MONTAGE



Pour votre première session de conduite, assurez-vous que votre Golden Eagle démarre sur une surface plane et que vous continuerez à conduire sur une surface plane.

AVANT DE MONTER SUR VOTRE GOLDEN EAGLE

1. Vérifiez que la clé a bien été retirée du contacteur à clé. Voir la section V. "Fonctionnement" de ce manuel. Vous éviterez ainsi d'activer accidentellement les commandes des palettes et de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
2. Vérifiez que le levier de la roue libre de votre Golden Eagle est en position engagée. Voir la section V. « Fonctionnement » de ce manuel.
3. Relevez ou enlevez les accoudoirs.



WARNING

Lorsque vous montez ou descendez de votre Golden Eagle, gardez votre poids vers le milieu de la plate-forme. Le fait de placer tout ou partie de votre poids sur le bord de la plate-forme peut provoquer une situation instable.

MONTER SUR VOTRE GOLDEN EAGLE

1. Positionnez le siège pour pouvoir monter facilement et en toute sécurité. Veillez à ce que le siège soit orienté vers l'avant.
- Voir section V. "Fonctionnement"
2. Remettez la barre franche en position verticale si nécessaire.
 3. Placez soigneusement un pied sur le centre approximatif du pont et asseyez-vous confortablement et solidement sur le siège.
 4. Relevez ou remplacera les accoudoirs.
 5. Placez la clé dans le contacteur à clé. Voir la figure 6 à la page 16.
 6. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position marchent.

VI. CONDUIRE VOTRE GOLDEN EAGLE

Conduite de base.

1. Assurez-vous que vous êtes assis correctement et en toute sécurité sur votre Golden Eagle.
 2. Tournez la molette de réglage de la vitesse à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la position la plus lente.
 3. Insérez la clé dans le contacteur à clé, si ce n'est pas déjà fait.
 4. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à la position "On".
 5. Placez vos mains sur les poignées.
- Si vous souhaitez rouler en marche avant, tirez le côté droit de la commande d'accélérateur vers l'arrière (ou poussez le côté gauche du levier de commande de l'accélérateur vers l'avant).
 - Si vous souhaitez rouler en marche arrière, tirez le côté gauche de la commande d'accélérateur vers l'arrière (ou poussez le côté droit de la manette des gaz vers l'avant).
6. Tirez sur la commande d'accélérateur pour faire accélérer doucement votre Golden Eagle.
 7. Relâchez la commande d'accélérateur pour permettre à votre Golden Eagle de s'arrêter doucement.
 8. Pratiquez ces deux fonctions de base jusqu'à ce que vous sentiez que vous maîtrisez votre scooter.

Direction

Diriger votre Golden Eagle est facile et logique.

1. Avec les deux mains sur les poignées de la barre (voir figure 4 à la page 13), tournez la barre vers la droite pour vous déplacer vers la droite.
2. Avec les deux mains sur les poignées de la barre (voir figure 4 en page 13), tournez la barre vers la gauche pour vous déplacer vers la gauche.
3. Assurez-vous de maintenir un espace suffisant lorsque vous tournez votre scooter afin que les roues arrière puissent franchir tout obstacle.



WARNING Si vous tournez votre scooter trop brusquement et à une vitesse trop élevée, vous risquez de voir l'une des roues quitter le sol. Cela peut augmenter le risque de renversement du scooter. Évitez ce danger à tout moment en décélérant et en tournant en grand arc de cercle autour des virages et des obstacles.

VI. CONDUIRE VOTRE GOLDEN EAGLE

Diriger dans les espaces restreints

Si vous devez vous diriger dans un endroit étroit, par exemple en entrant dans une porte ou en faisant demi-tour :

1. Arrêtez complètement votre Golden Eagle.
2. Régler la vitesse au niveau le plus bas.
3. Tournez la barre dans la direction dans laquelle vous souhaitez conduire.

Pour plus d'informations sur les obstacles et les zones étroites, reportez-vous à la section "Contrôle des zones étroites" à la page suivante.

Direction en marche arrière

Protéger votre Golden Eagle nécessite d'être attentif à ce que vous faites.

1. Utilisez vos doigts droits pour pousser la commande d'accélérateur ou utilisez vos doigts gauches pour tirer sur la commande d'accélérateur. Voir la figure 5 à la page 16.
2. Tournez la barre franche vers la gauche pour conduire en marche arrière vers la gauche.
3. Tournez la barre franche vers la droite pour conduire en marche arrière vers la droite.

NOTICE

La vitesse de votre Golden Eagle en marche arrière est égale à cinquante pour cent de la vitesse en marche avant réglée sur le cadran de contrôle de la vitesse.



WARNING

Prévenir les blessures ! Ne descendez pas une pente en marche arrière.

VI. CONDUIRE VOTRE GOLDEN EAGLE

CONTRÔLE DANS LES ESPACES RESTREINTS

Lorsque vous utiliserez votre Cricket™ pour accroître votre mobilité, vous rencontrerez sans aucun doute des obstacles qu'il vous faudra pratiquer pour les franchir en douceur et en toute sécurité. Vous trouverez ci-dessous quelques obstacles courants que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation quotidienne de votre scooter. Ces obstacles sont accompagnés de quelques conseils de conduite qui devraient vous aider à les surmonter. Apprenez et suivez ces conseils et, avec une facilité surprenante, vous contrôlerez bientôt votre fauteuil électrique en le manœuvrant à travers les portes, en montant et en descendant les rampes, en montant et en franchissant les bordures, dans l'herbe et le gravier, et en montant et en descendant les pentes.

Rampes

Lorsque vous montez une rampe, un trottoir ou une pente :

- Penchez-vous en avant sur votre siège pour déplacer votre centre de gravité vers l'avant afin d'assurer une stabilité et une sécurité maximales. Si la rampe comporte un virage en épingle à cheveux, vous devez avoir une bonne capacité à prendre des virages.
- Manœuvrez votre Golden Eagle de façon à ce que les roues avant fassent un grand écart autour des coins de la rampe.
- Cela permettra aux roues arrière de votre scooter de suivre un large arc de cercle autour du virage, en restant à l'écart des obstacles.

Si vous devez arrêter votre Golden Eagle pendant que vous montez une rampe :

- Pour redémarrer, il vous suffit d'exercer une pression douce et régulière sur la commande d'accélérateur.
- Accélérez doucement après vous être arrêté sur une pente.

Descendre une rampe :

- Maintenez la molette de réglage de la vitesse de votre Golden Eagle réglée à fond dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, à la vitesse la plus lente.
- Si vous devez vous arrêter, relâchez la commande d'accélérateur lentement et sans à-coups.



WARNING

Prévenir les blessures ! Ne descendez pas une pente en marche arrière.

Bordures

- Voir les spécifications pour la hauteur maximale des trottoirs.
- Faites toujours preuve de prudence lorsque vous négociez une bordure de trottoir.
- Montez ou descendez un trottoir de front à un angle direct de 90°.
- Approchez et négociez le trottoir de manière à ce que les deux roues arrière de votre scooter franchissent le trottoir en même temps.
- N'abordez jamais une pente ou un trottoir en le traversant. Cela pourrait faire basculer le scooter.
- Descendez lentement un trottoir pour éviter les chocs. Utilisez le moins de puissance possible.

Herbe et gravier

Votre Golden Eagle fonctionne admirablement bien sur l'herbe, le gravier et les collines, mais vous devez respecter les paramètres opérationnels présentés dans ce manuel. Reportez-vous à la section "Sécurité". Si vous n'êtes pas sûr d'une situation, évitez-la. Le bon sens est votre meilleure protection.

- N'hésitez pas à utiliser votre Golden Eagle sur les pelouses ou dans les parcs.
- Évitez les herbes hautes ou longues, qui pourraient s'enrouler autour des essieux de votre scooter.
- Évitez les gravillons.

VII. DÉMONTAGE

DÉMONTAGE

Lorsque vous démontez votre scooter, veuillez à suivre ces instructions simples.

Retirer le siège

1. Placez votre scooter sur une surface plane.

Retirez la clé de l'interrupteur à clé avant de commencer à démonter votre Golden Eagle.



WARNING

Ne tirez jamais sur les bras et ne les utilisez pas comme poignée pour déplacer le scooter, car ils pourraient se plier par inadvertance et provoquer des blessures.

2. Rabattez le dossier du siège, saisissez le siège sur les côtés opposés et, avec une prise ferme, tirez le siège tout droit vers le haut et hors du socle du siège. Voir figure 13.



Figure 13. Démontage du siège

Pour retirer la batterie

4. Retirez le couvercle de la batterie en le soulevant. Voir figure 14.

5. Retirez la bande Velcro de chaque batterie, puis débranchez les batteries du scooter.

6. Soulevez les batteries (2) pour les sortir du scooter.



VII. DÉMONTAGE

Déposer le panier de la barre franche

7. Retirez le panier de la barre franche en le tirant vers le haut.

Rabattre et verrouiller la barre franche

8. Utilisez une main pour saisir la poignée de la barre franche. Utilisez l'autre main pour pousser vers le haut le levier de réglage de la barre franche. Déplacez la barre franche vers le bas. Relâchez le levier de réglage pour verrouiller la barre en place. Voir figure 15.



WARNING

Le scooter Golden Eagle pèse environ 152 livres avec le siège, les batteries et la barre franche enlevés. Soyez prudent lorsque vous déplacez ou soulevez le scooter.



AVERTISSEMENTS ! Faites attention aux points de pincement étiquetés ! Veillez à ne pas vous pincer les doigts entre les pièces mobiles ou amovibles lors du démontage de votre scooter. Toute votre attention est requise !



Manche de barre franche



Figure 15. Barre franche abaissée

VIII. ASSEMBLAGE



AVERTISSEMENTS ! Soyez attentif aux éventuels points de blocage ! Veuillez noter les étiquettes d'avertissement aux points de pincement lors de l'assemblage.



AVERTISSEMENTS ! Risque de pincement et d'écrasement ! Les risques de pincement ou d'écrasement augmentent en raison du poids des composants (tels que les batteries) lors de la préparation du transport et des travaux d'entretien. Les travaux à effectuer doivent toujours être exécutés avec le plus grand soin. Veillez à toujours vous faire aider par une deuxième personne, en particulier lorsque vous rangez des pièces pour le transport.



AVERTISSEMENTS ! Point de pincement : Un point de pincement est une zone où vous **DEVEZ** prendre garde à ce que vos doigts ne soient **PAS** pincés entre deux zones de métal ou de plastique dur. C'est lors de l'assemblage du scooter Golden Eagle que les risques de pincement sont les plus importants.



WARNING

RISQUE DE BLESSURE EN CAS D'ASSEMBLAGE INCORRECT !

Assurez-vous que tous les composants du scooter ont été correctement assemblés. Lors de l'assemblage, vérifiez que tous les dispositifs de connexion/verrouillage sont bien en place.



Figure 16. Composants Golden Eagle (Modèle GR595)

VIII. ASSEMBLAGE

Installation des batteries

1. Abaissez délicatement les batteries (2) dans leur compartiment et fixez-les à l'aide d'une bande Velcro. Voir figure 17.
2. Branchez les câbles des batteries (2) dans les connecteurs de couleur correspondante sur le scooter.

Installez le couvercle de la batterie

3. Placez le couvercle de la batterie sur les batteries et fixez-le en place.

Installation du siège

4. Tenez le siège à un angle tel que vous puissiez voir le pivot du siège en dessous.
5. Placez la tige de selle pivotante dans la tige de selle réceptrice comme indiqué dans la figure 18.
6. Appuyez sur le siège pour le verrouiller en place. Déplacez le siège d'un côté à l'autre pour vous assurer qu'il est bien verrouillé en place.



Figure 17. Installation des batteries



AVERTISSEMENTS ! Point de pincement !

N'approchez pas les mains et les vêtements du pivot et de la tige de selle.

AVERTISSEMENTS ! Risque d'accident dû à un siège non enclenché ! Assurez-vous que le siège est bien enclenché en le tournant légèrement vers la gauche et vers la droite.

Figure 18. Installation du siège

Déverrouiller la barre franche

7. Saisissez d'une main la poignée de la barre franche. Utilisez l'autre main pour saisir et pousser vers le haut le levier de réglage de la barre franche. Placez la barre franche dans la position souhaitée. Relâchez le levier de réglage pour verrouiller la barre franche en place. Voir la figure 15 à la page 26.

Installer le panier de la barre franche

8. Placez le panier sur le support de la barre franche et poussez-le vers le bas pour le verrouiller en place.

Risque d'accident dû à une mauvaise position du siège ! Tournez toujours le siège vers l'avant et enclenchez-le avant de conduire. Si le siège est dans une autre position, le risque de

VIII. ASSEMBLAGE

basculement est accru. Avant de tourner le siège, assurez-vous toujours que le scooter se trouve sur une surface plane et solide.

IX. TRANSPORT DE VOTRE GOLDEN EAGLE



Golden Eagle

NOTICE

Le Golden Eagle peut être équipé d'un dispositif d'amarrage pour le chargement sur un véhicule au moyen d'un élévateur ou d'un palan mécanique. Contactez votre fournisseur Golden Technologies, Inc. pour plus d'informations concernant les dispositifs d'amarrage et les dispositifs de levage de scooter.

Pour transporter votre Golden Eagle :

- Démontez ou repliez le siège et la barre franche (voir section VII. "Démontage") le plus près possible de la zone de chargement du véhicule qui sera utilisé pour le transport de votre scooter.
- Le degré de démontage de votre Golden Eagle ou de pliage du siège et de la barre dépend de la taille et de la forme de l'aire de chargement du véhicule de transport.
- Des couvertures de déménagement ou d'autres formes de rembourrage peuvent être utilisées pour protéger votre Golden Eagle pendant le transport.

CAUTION

- **Ne** soulevez **pas** votre Golden Eagle par ses parties en plastique. Les dommages causés à ces pièces ne sont pas couverts par la garantie.
- N'utilisez **pas** les pneus ou les roues pour soulever le chariot arrière. Le chariot peut tourner et blesser quelqu'un ou être endommagé.

Si votre scooter et ses composants ne sont pas correctement et solidement rangés pendant le transport, ceux-ci peuvent se déplacer ou être projetés dans l'air et causer des blessures ou des dommages.

Ne vous asseyez jamais sur votre Golden Eagle lorsqu'il est transporté. Il est recommandé de toujours attacher solidement votre Golden Eagle avec un système d'arrimage approuvé lorsque vous transportez votre scooter.



WARNING

Si vous transportez votre Golden Eagle sur un élévateur extérieur, enlevez le siège ou assurez-vous que le siège est bien attaché à l'aide d'un système d'attache approuvé par le fabricant de l'élévateur pendant le transport de votre scooter. Si vous ne le faites pas, le siège pourrait se détacher et s'envoler. Cette situation pourrait gêner la circulation derrière vous et entraîner des blessures

X. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

ENTRETIEN DE ROUTINE

Votre scooter ne nécessite qu'un minimum d'entretien et de maintenance. Si vous ne vous sentez pas capable d'effectuer les opérations d'entretien énumérées ci-dessous, vous pouvez programmer une inspection et un entretien avec votre fournisseur.

- ✓ Veillez à ce que vos batteries soient complètement chargée chaque jour. Voir "Chargement de la batterie".
- ✓ Inspectez régulièrement les pneus de votre scooter pour détecter tout signe d'usure.
- ✓ Inspectez régulièrement tous les harnais et connexions exposés pour vérifier qu'ils ne sont pas usés, endommagés ou corrodés. Demandez à votre fournisseur de réparer ou de remplacer tout harnais ou connecteur endommagé.
- ✓ Vérifiez périodiquement le serrage, l'usure et la corrosion de toutes les fixations. Si vous constatez la présence de l'un de ces éléments, arrêtez le scooter et contactez votre fournisseur.



WARNING

Faites attention aux points de pincement et aux pièces métalliques tranchantes (portez des gants).

- ✓ Gardez toutes les composantes électriques (le chargeur, le panneau de la console et l'électronique) à l'abri de l'humidité. Si l'un de ces éléments est exposé à l'humidité, laissez-le sécher complètement avant d'essayer de faire fonctionner votre scooter à nouveau.
- ✓ Tous les roulements sont lubrifiés en permanence et scellés. Aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.

CLEANING YOUR GOLDEN EAGLE

Pneus :

- Nettoyez les pneus avec un produit de nettoyage ordinaire et un chiffon humide.
- Ne pas utiliser de solvants sur les pneus. Les solvants peuvent entraîner la dégradation du matériau du pneu ou le rendre trop mou.
- N'utilisez jamais de produits à base de silicone sur les pneus, car ils risquent de les faire glisser.
- Vérifiez la pression des pneus toutes les 3 semaines.

Remarque : Pour connaître la pression des pneus et la procédure de gonflage, reportez-vous à la page 33.

Structure

Les carénages de votre scooter sont en plastique ABS et sont peints pour plus de style et de durabilité.

NOTICE

N'utilisez pas trop d'eau ou de pression lorsque vous nettoyez votre scooter.

- **Ne passez jamais** votre scooter dans une station de lavage.
- **N'utilisez jamais** un tuyau à haute pression pour laver votre scooter.
- Utilisez de l'eau froide mélangée à un savon doux pour éliminer la saleté et les huiles. Nettoyez la structure de votre scooter avec un chiffon humide. Séchez avec un chiffon doux et propre. Polissez à la main avec un chiffon doux.
- N'utilisez **pas** d'objet pointu pour retirer les pièces du carénage.

Siège en vinyle

Nettoyez avec un savon doux ou un détergent doux et un chiffon humide. Un nettoyant pour vinyle peut également être utilisé.

Tapis de sol en caoutchouc

Le tapis de sol en caoutchouc s'enclenche sur le plancher du scooter. Tirez simplement sur le tapis pour

X. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

le retirer.

- Nettoyez le tapis de sol à l'aide d'un nettoyant de cuisine ordinaire et d'un chiffon humide.
- N'utilisez pas de solvants sur le tapis de sol. Les solvants peuvent entraîner la dégradation du matériau.

⚠ CAUTION Ne N'utilisez jamais de produits à base de silicone, car ils risquent de faire glisser le tapis.

X. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

IMPORTANT ! Les batteries neuves **DOIVENT** être entièrement chargées avant la première utilisation de votre appareil **Chargez les nouvelles batteries pendant 12 heures, même si la jauge de la batterie indique déjà une charge complète.** Cela permet de conditionner les nouvelles batteries pour qu'elles soient les plus performantes possible.

AVERTISSEMENTS ! Produits chimiques corrosifs contenus dans la batterie.
Les conditions de la batterie sont explosives.



AVERTISSEMENTS ! La surface du chargeur peut devenir
CHAUDE. Risque électrique !

BATTERIE ET RECHARGE

L'entretien de la batterie est la partie la plus importante de l'entretien de votre scooter. Le fait de maintenir la batterie complètement chargée permet de prolonger la durée de vie de la batterie. Suivez les conseils suivants pour maintenir vos batteries dans un état optimal.

- Les batteries doivent être chargées au maximum pour une utilisation quotidienne. Nous vous recommandons de brancher le chargeur externe après chaque utilisation et de le charger pendant 6 à 8 heures.

"Pour de meilleurs résultats, veuillez recharger vos batteries pendant la nuit après chaque utilisation

- Si vous ne comptez pas utiliser le scooter pendant plus d'une semaine, **chargez complètement** les batteries, puis débranchez-les du scooter. Voir la figure 14 à la page 25.

Liste de contrôle des instructions de chargement pour optimiser la durée de vie de la batterie

- ✓ N'utilisez que le chargeur automatique hors-bord fourni pour toutes les opérations de charge courantes.
- ✓ N'utilisez jamais un chargeur de type automobile ou humide.
- ✓ Évitez les décharges profondes et ne videz jamais complètement les piles.
- ✓ Ne laissez pas les batteries dans un état de charge faible pendant des périodes prolongées. Chargez une batterie déchargée dès que possible.
- ✓ Rechargez complètement les piles régulièrement.
- ✓ Les piles doivent toujours être stockées entièrement chargées.
- ✓ Vérifiez les batteries stockées une fois par mois et rechargez-les si nécessaire.

Pour charger les batteries :

Le chargeur de tous les modèles Golden Eagle est un chargeur externe. Pour charger les batteries, soulevez le couvercle et branchez le chargeur sur le port de charge de la barre franche. Voir figure 19.

Lorsque les batteries sont complètement chargées, débranchez le cordon d'alimentation du chargeur de la prise murale et de la prise de chargement.



Figure 19. Chargement des batteries

Votre scooter ne bougera pas tant que le chargeur restera connecté.

Entretien de la batterie

OBLIGATOIRE ! N'utilisez que des batteries AGM ou GEL SLA à décharge profonde pour faire fonctionner les scooters Golden Eagle.

X. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Ces batteries ne nécessitent pas d'entretien.
- Il n'y a aucun risque de déversement ou de fuite, de sorte que ces batteries peuvent être transportées en toute sécurité dans les avions, les bus, les trains, etc.
- En suivant les procédures décrites dans ce manuel, vous pouvez espérer prolonger la durée de vie des batteries de votre Golden Eagle.

SI VOTRE Golden Eagle NE FONCTIONNE PAS

- Assurez-vous que le levier de la roue libre est en position engagée. Voir page 20.
- Vérifier le disjoncteur principal. Si nécessaire, réinitialiser le disjoncteur. Voir figure 20.
- Assurez-vous que la molette de réglage de la vitesse est sur la position souhaitée.
- Assurez-vous que l'interrupteur à clé est en position "On".

Si aucune des procédures ci-dessus ne résout le problème, contactez votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc.

DISJONCTEUR PRINCIPAL

Le bouton de réinitialisation du disjoncteur principal est situé sur le côté gauche du carénage arrière, juste devant la roue arrière. Voir figure 20.



AVERTISSEMENTS ! N'essayez pas de faire des réparations électriques. Consultez Golden Technologies, Inc. ou votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc. Si, sans raison apparente, votre Golden Eagle cesse de fonctionner, il se peut que le disjoncteur principal soit déclenché.

Causes possibles de déclenchement du disjoncteur principal :

- Gravier une colline longue et abrupte.
- Conduire sur une bordure de trottoir.
- Low tire pressure. Voir le gonflage correct des pneus à la page 33
- Batteries déchargées.

Au fur et à mesure que vous utilisez votre Golden Eagle, la tension de la batterie diminue et le courant de la batterie doit augmenter pour satisfaire les demandes du moteur et des autres dispositifs électriques fonctionnant sur votre scooter. Cela peut provoquer un appel de courant important qui déclenchera le disjoncteur principal.

Solution :

- Rechargez les batteries de votre Golden Eagle. Reportez-vous à la section "Batteries et Recharge" à la page 31.
- Si le problème persiste, demandez à votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc. de procéder à un test de charge des batteries.
- Si les batteries sont en bon état, il se peut que le chargeur soit à l'origine du problème. Consultez votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc.

Réinitialisation du disjoncteur principal

1. Si le disjoncteur principal se déclenche en raison de batteries déchargées ou d'une surcharge temporaire, réinitialisez le disjoncteur :
2. Attendez une dizaine de minutes pour que la carte de commande du moteur revienne dans la plage de température normale de fonctionnement.
3. Assurez-vous que l'interrupteur à clé est en position "Off".
4. Appuyez sur le bouton de réinitialisation du disjoncteur principal. Voir figure 20.

Si le disjoncteur principal continue à se déclencher, il y a probablement un problème électrique sous-jacent qui doit être résolu.

- Contactez votre fournisseur agréé Golden Technologies, Inc.
- **Ne réinitialisez pas** le disjoncteur principal sans avoir corrigé le problème électrique sous-jacent.



Figure 20. Disjoncteur

GONFLAGE CORRECT DES PNEUS



WARNING Golden Technologies, Inc. ne recommande pas de démonter le pneu des roues dont la jante est fendue. Contactez votre fournisseur Golden agréé pour obtenir de l'aide à ce sujet. Si vous devez démonter un pneu de la jante fendue, le pneu doit être complètement dégonflé. Si le pneu n'est pas complètement dégonflé, vous risquez de vous blesser gravement.

NOTICE

Des pneus sous-gonflés entraîneront une perte significative de la portée opérationnelle
chauffe de la carte de commande du moteur.

Pour gonfler un pneu :

1. Retirez le bouchon de la tige de la valve en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Gonflez le pneu à 35 psi.
3. Remettez le capuchon de la tige de la valve en place et tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer.
4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque pneu.



WARNING Ne dépassez pas la pression maximale recommandée par le fabricant de pneus.

DIAGNOSTICS

La fonction de diagnostic de votre panneau de contrôle de moteur à microprocesseur Golden Eagle fonctionne comme suit :

- Toute condition défectueuse du contrôleur ou d'un système associé fera clignoter le scooter et affichera un code d'erreur.
- Le nombre de clignotements de l'ECU dans chaque série, et l'E-CODE associé affiché sur l'écran LCD est appelé le code d'erreur.
- Le code d'erreur indique la nature de la condition ou du défaut.

CODES D'ERREUR (codes ECU)

Le contrôleur S-Drive utilise des clignotements et un code d'erreur pour indiquer l'état du système. Lorsque le contrôleur constate un dysfonctionnement du système, il fait clignoter un code ECU et affiche un code E lorsque le véhicule est en marche. Le signal est constitué d'une série de clignotements avec un délai de deux secondes entre les codes ECU. Le signal de diagnostic lent retentit ensuite une fois. Par exemple, lorsqu'il clignote cinq fois et s'arrête, cela indique le code E n° 5 - Défaillance des freins.

Les codes suivants de l'ECU sont utilisés pour aider à diagnostiquer les erreurs du système :

Code FLASH #2 - Tension de batterie faible
Code FLASH #3 - Tension élevée de la batterie
Code FLASH #5 - Déclenchement du solénoïde de freinage
Code FLASH #6 - Déclenchement de l'accélérateur
Code FLASH #7 - Problème de volume de vitesse
Code FLASH #8 - Moteur déconnecté
Code FLASH #9 - Déclenchement possible du contrôleur

X. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

CODE BIP #1 - MODE VEILLE

Pour économiser la batterie, le contrôleur est réglé pour passer en mode veille après 15 minutes d'inactivité avec la clé allumée. Pour le réinitialiser, éteignez puis rallumez la clé.

CODE BIP #2 - FAIBLE TENSION DE LA BATTERIE

La batterie a besoin d'être rechargée ou il y a une mauvaise connexion à la batterie. Vérifiez les connexions à la batterie. Si les connexions sont bonnes, essayez de charger la batterie.

CODE BIP #3 - TENSION ÉLEVÉE DE LA BATTERIE

Une tension excessive a été appliquée au S-drive. Cela est généralement dû à une mauvaise connexion à la batterie. Vérifiez les connexions de la batterie. REMARQUE : L'erreur peut n'être présente que lorsque vous descendez une colline et qu'il y a un retour de courant vers les batteries.

CODE BIP #5 - DÉCLENCHEMENT DU SOLÉNOÏDE DE FREIN

Le frein de stationnement est mal connecté. Vérifiez les connexions du frein de stationnement et du moteur. Assurez-vous que toutes les connexions du système sont sûres.

CODE BIP #6 - DÉCLENCHEMENT DE L'ACCÉLÉRATEUR (HORS DU POINT MORT)

Un déclenchement de l'accélérateur est indiqué. Assurez-vous que l'accélérateur est en position neutre avant de mettre le scooter en marche.

CODE BIP #7 - DÉCLENCHEMENT DE LA COMMANDE D'ACCÉLÉRATEUR/DÉFAUT DU CONTRÔLE DE VITESSE (ERREUR DE VOLTAGE).

Un déclenchement de l'accélérateur est indiqué. Indique un problème avec la commande d'accélérateur ou le contrôle de vitesse.

CODE BIP #8 - MOTEUR DÉCONNECTÉ

Le moteur est mal connecté. Vérifiez toutes les connexions et les fils entre le moteur et le S-drive. Vérifiez la position du commutateur de roue libre.

CODE BIP #9 - DÉCLENCHEMENT POSSIBLE DU CONTRÔLEUR

Un déclenchement du système de contrôle est indiqué. Assurez-vous que toutes les connexions sont sûres. Vérifiez que chaque pneu est correctement gonflé. Voir "Gonflage correct des pneus" à la page 33.

NOTICE POUR VOTRE COMMODITÉ, CES FLASHS DE DIAGNOSTIC ET CODES ÉLECTRONIQUES AINSI QUE LE NUMÉRO DE SÉRIE DE VOTRE SCOOTER SE TROUVENT SOUS LE TAPIS DE SOL. CELA VOUS PERMETTRA D'ACCÉDER À TOUT MOMENT AUX INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LE SERVICE. DANS LA MESURE DU POSSIBLE, VEUILLEZ CONSULTER CES INFORMATIONS AVANT DE CONTACTER VOTRE DISTRIBUTEUR AGRÉÉ GOLDEN TECHNOLOGIES, INC. PROVIDER.

XI. GARANTIE



Garantie consommateur limitée
Scooters

Golden Technologies a fourni des informations dans ce manuel d'utilisation concernant l'utilisation et l'entretien de votre scooter. Le non-respect de ces informations annulera la garantie du scooter, de ses pièces et de la batterie fournie par Golden Technologies.

La garantie suivante n'est accordée qu'au consommateur INITIAL qui a acheté notre produit et prend effet à la date d'achat par le consommateur auprès d'un revendeur agréé de Golden Technologies.

Provider. Le consommateur doit être en possession d'une carte d'enregistrement de la garantie déposée auprès de Golden Technologies pour bénéficier du service.

La garantie couvre les modèles de scooters suivants, sauf indication contraire :

- | | | |
|---|---|---------------------------------|
| ♦ BUZZaround LT : GB107 | ♦ BUZZaround Extreme: GB118, GB148 | ♦ Tous les modèles |
| ♦ Série Buzzaround XL™ : GB117D, GB117S, GB117H, GB117Z | ♦ BUZZaround Luxe : GB119, GB149 | Companion : GC240, GC340, GC440 |
| GB147D, GB147S, GB147H, GB147Z | ♦ Série LiteRider : GL109, GL111, GL141 | ♦ Avenger : GA541 |
| | | ♦ Patriot : GR575 |
| | | ♦ Golden Eagle : GR595 |

Garantie à vie limitée :

Pour la durée de vie du scooter, à partir de la date d'achat auprès d'un revendeur autorisé de Golden Technologies, en cas de défaut de matériaux ou de fabrication, Golden Technologies réparera ou remplacera, à notre discrétion, n'importe laquelle des composantes du cadre structurel suivantes, jugées défectueuses par un représentant autorisé de Golden Technologies :

- | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------|
| ♦ Structure en acier | ♦ Châssis de barre franche | ♦ Tige de sel |
| ♦ Soudures de la structure | ♦ Fourche avant | |

***Le GR595 est garanti pendant CINQ ANS**

Garantie de deux ans :

Pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériaux ou de fabrication, Golden Technologies réparera ou remplacera, à sa discrétion, par des composants neufs ou remis à neuf, tout composant de la chaîne cinématique jugé défectueux par un représentant autorisé de Golden Technologies :

- | | |
|--------------|--|
| ♦ Boîte-pont | ♦ Ensemble moteur/frein (fonction électrique uniquement) |
|--------------|--|

Remarque : Une augmentation du bruit de fonctionnement de la boîte-pont NE CONSTITUE PAS un défaut. Avec l'usure normale, le bruit de fonctionnement devrait augmenter.

Pendant une période de deux ans à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériel ou de fabrication, Golden Technologies réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout assemblage électronique suivant jugé défectueux par un représentant autorisé de Golden Technologies :

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------|
| ♦ Contrôleur électronique | ♦ Assemblage du tableau de bord | ♦ Harnais de câbles |
| ♦ Chargeur de batterie | ♦ Assemblage du potentiomètre | |

Remarque : Pendant la charge des batteries, il est normal que le chargeur chauffe. La chaleur dégagée par le chargeur de batterie ne constitue pas un défaut.

Garantie limitée d'un an

Pendant une période d'un an à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériel ou de fabrication, Golden Technologies remplacera les **batteries fournies par Golden Technologies** si un représentant autorisé de Golden Technologies constate qu'elles sont défectueuses.

XI. GARANTIE



Garantie consommateur
limitée

Garantie limitée d'un an :

Scooters (suite)

Pendant une période d'un an à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériel ou de fabrication, Golden Technologies réparera ou remplacera, à sa discrétion, toutes les pièces suivantes jugées défectueuses par un représentant autorisé de Golden Technologies :

- | | | |
|------------------------------|---------------------------|--------------------------------|
| ♦ Paliers | ♦ Composants en | ♦ Composants en plastique (à |
| ♦ Bagues | caoutchouc (à l'exclusion | l'exclusion de la carrosserie) |
| ♦ Mécanisme de pivotement du | des pneus) | |
| siège | ♦ Repose-main | |

Les éléments non listés sont couverts à la discrétion de Golden Technologies. Tous les accessoires, standard ou optionnels, fournis par Golden Technologies, sont couverts pour une période d'un an à compter de la date d'achat de l'unité en question.

Exclusions de la garantie :

Golden Technologies n'offre aucune garantie sur les éléments suivants, qui peuvent nécessiter un remplacement en raison de l'usure normale liée à l'utilisation quotidienne :

- | | | |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| ♦ Pneus et chambres à air | ♦ Balais du moteur | ♦ Plaquettes de frein |
| ♦ Caches en plastique ABS | ♦ Ampoules/fusibles | ♦ Rembourrage |
| ♦ Coussinets d'accoudeur | | |

Cette garantie exclut également les éléments suivants :

- ♦ Perte ou vol de composants (clés, paniers, etc.)
- ♦ Dommages causés par :
 - Fuite ou écoulement du liquide de la batterie.
 - Abus, mauvaise utilisation, accident ou
 - négligence. Fonctionnement, entretien ou
 - stockage inadéquats. Utilisation commerciale
 - ou autre que normale.Réparations et/ou modifications apportées à toute pièce sans l'accord spécifique de Golden Technologies.
- Dépassement de la capacité de charge spécifiée de l'appareil.
Les accessoires autres que ceux fournis ou approuvés par Golden Technologies. Non-respect des instructions relatives au produit.
Les catastrophes naturelles, telles que la foudre, les tremblements de terre, etc. les circonstances indépendantes de la volonté de Golden Technologies.

♦ TOUTE PIÈCE MODIFIÉE OU RÉPARÉE PAR UNE PERSONNE NON AUTORISÉE.

Service de garantie :

Le service de garantie doit être effectué par un représentant autorisé de Golden Technologies. Golden Technologies se réserve le droit de remplacer les pièces garanties par des pièces remises à neuf ou neuves, à sa discrétion. Tous les frais de main-d'œuvre, les appels de service, les coûts de transport ou tout autre frais associé à l'installation d'une ou de plusieurs pièces garanties sont à la charge du consommateur. La garantie porte uniquement sur le remplacement des pièces et n'inclut pas les frais de transport des pièces de rechange. Les consommateurs ne doivent pas retourner d'articles à Golden Technologies sans autorisation écrite préalable. Tout dommage survenu pendant le transport des pièces garanties relève de la seule responsabilité du consommateur.

XI. GARANTIE

Il n'existe aucune autre garantie expresse.

Les garanties implicites, y compris celles de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, sont exclues. Toute responsabilité pour des dommages indirects est exclue. Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.

GOLDEN PRODUCT REGISTRATION

Register Now To Lock In Your Warranty and Receive Important Product Updates

SAVE TIME - REGISTER ONLINE: WWW.GOLDENTECH.COM

SERIAL NUMBER

Most Lift Chairs Have On Controller Wire or Back Rail of the Metal Frame

Most Scooters & Powerchairs On Seat Post, Under/On Battery, or Under Carpet

[illegible]**PRODUCT MODEL NUMBER**

Most Lift Chairs Start with PR (PR401, PR510, etc)

Most Scooters with G (GA, GB, GC, GL, GR, etc) Most Powerchairs with GP

[illegible]

PURCHASE DATE

FIRST NAME

LAST NAME

[illegible]

ADDRESS

[illegible]

ADDRESS LINE 2

[illegible]

CITY

[illegible]

STATE / PROVINCE ZIP / POSTAL CODE

[illegible]

E-MAIL ADDRESS

[illegible]**PROVIDER NAME**[illegible]**PROVIDER'S ADDRESS**[illegible]

ADDRESS LINE 2

[illegible]

CITY

[illegible]

STATE / PROVINCE

ZIP / POSTAL CODE

[illegible]

COUNTRY

[illegible]

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
Product comments:

Product comments:

Rate Provider Experience (Circle One - 1 Bad, 5 Great)


- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

Pliez d'abord ici



Placez
le
timbr
e ici

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Golden Technologies 401
Bridge Street
Old Forge, PA 18518



Pliez ensuite ici



Modèle GR595



401 Bridge Street Old
Forge, PA 18518
Tel : 800-624-6374
Fax : 800-628-5165
www.goldentech.com