

GOLDEN
Stride



**Manuel d'utilisation
Traction arrière
Fauteuil roulant électrique
Modèle GP301**



Golden Technologies - 401 Bridge Street - Old Forge, PA 18518

Tél : 800-624-6374 - Fax : 800-628-5165 - www.goldentech.com

Merci d'avoir acheté votre Stride™. Nous sommes honorés que vous ayez choisi Golden Technologies pour vos besoins de mobilité.

Stride™ (modèle GP301) Liste d'emballage standard :
Fauteuil roulant électrique avec pochette sous le siège
1 Manuel d'utilisation
1 Batterie
1 Fanion de sécurité
1 Commande par joystick
1 Chargeur de batterie

POUR VOS DOSSIERS

Veuillez remplir les informations ci-dessous concernant votre Stride™. Ces informations vous seront utiles si vous devez contacter Golden Technologies, Inc. au sujet de votre fauteuil électrique.

Votre Stride™

Modèle _____ Numéro de série _____

Date d'achat _____ Couleur de la carrosserie _____

Options _____

Votre représentant ou fournisseur Golden

Nom _____

Entreprise _____

Adresse _____

N'oubliez pas de remplir et de renvoyer votre carte d'enregistrement de garantie.



AVERTISSEMENT

Nous vous demandons de lire entièrement ce manuel avant d'utiliser votre nouveau Stride™. Golden Technologies, Inc. n'est pas et ne peut être tenu responsable de tout dommage ou blessure résultant d'une utilisation inappropriée ou dangereuse du Golden Stride™. Golden Technologies, Inc. décline spécifiquement toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels pouvant survenir lors d'une utilisation non conforme aux lois ou ordonnances fédérales, nationales ou locales applicables.

Utilisation prévue : L'utilisation prévue du Stride™ est de fournir une mobilité aux adultes, limités à une position assise et ayant la capacité d'utiliser une simple commande manuelle.

TABLE DES MATIÈRES

I. Introduction.....	4-6
II. Sécurité	7-11
III. EMI/RFI.....	12
IV. Caractéristiques techniques Stride™	13
V. Composants principaux.	12-14
VI. Assemblage et pliage de votre Stride™	15-17
VII. Fonctionnement	18-22
Caractéristiques de contrôle.....	18
Batterie et chargement.	19-20
Rouler avec votre Stride™	20-21
Contrôle dans les endroits étroits.....	22
VIII. Diagnostic et dépannage.	23
IX. Entretien et Maintenance.	24-25
X. Garantie	26-27
Carte de garantie/enregistrement.	28-29



Scannez avec l'appareil photo de votre smartphone ou visitez **www.goldentech.com/manuals** pour consulter ou télécharger ce document dans d'autres langues.

I. INTRODUCTION

Félicitations pour l'achat de votre nouveau Stride™. Le Stride™ associe une technologie de pointe à un design attrayant qui est également très fonctionnel dans le monde d'aujourd'hui. Chez Golden Technologies, Inc., nous savons que vous avez choisi un fauteuil électrique qui vous donnera des années de fonctionnement fiable et qui améliorera votre qualité de vie en vous donnant la mobilité nécessaire pour mener une vie quotidienne active.

Bien que votre nouveau Stride™ soit à la fois convivial et conçu pour une maniabilité maximale, même dans les espaces les plus restreints, nous vous demandons de lire, de comprendre et de suivre toutes les instructions et suggestions de ce manuel avant d'utiliser votre fauteuil électrique pour la première fois. Il est essentiel pour nous d'assurer la sécurité d'utilisation de votre nouveau fauteuil électrique.

Si vous avez des difficultés à comprendre les instructions et les suggestions présentées dans ce manuel, ou si, pour quelque raison que ce soit, vous ne vous sentez pas capable d'effectuer les activités nécessaires au montage, au démontage, à l'utilisation ou à l'entretien de votre Stride™, veuillez contacter votre fournisseur local de Golden Technologies, Inc. ou appelez le service d'assistance technique de Golden Technologies, Inc. au (800) 624-6374.

Golden Technologies, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages corporels ou matériels résultant d'une utilisation dangereuse ou inappropriée de l'un de nos produits de mobilité personnelle. En outre, Golden Technologies, Inc. ne peut être tenu responsable des dommages corporels ou matériels résultant d'une tentative de suivre les instructions, les suggestions et les directives présentées dans ce manuel d'utilisation.

Notre département de recherche et développement, notre département de contrôle de la qualité et notre département d'ingénierie ont utilisé les spécifications et les informations de conception les plus récentes pour fabriquer votre Stride™. Golden Technologies, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à sa gamme de produits lorsque celles-ci s'avèrent utiles ou nécessaires. Si des modifications sont apportées à notre gamme de produits, il peut y avoir des différences mineures entre le produit que vous avez acheté et les illustrations et instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.

Veuillez remplir et envoyer la carte d'enregistrement de la garantie ci-jointe. L'inscription est également possible à l'adresse www.goldentech.com. Golden Technologies, Inc. aimerait connaître la fiabilité de votre Stride™ et le confort de mobilité qu'il vous a procuré. Nous aimerions également connaître le service que vous avez reçu de votre fournisseur ou représentant local de Golden Technologies, Inc.

Golden Technologies, Inc.
401 Bridge Street
Old Forge, PA 18518

Téléphone : (570) 451-7477
Fax : (570) 451-7494
Numéro vert : (800) 624-6374

Pour plus d'informations sur nos produits et services ou pour nous faire part de vos commentaires, veuillez consulter notre site web à l'adresse suivante : www.goldentech.com

I. INTRODUCTION

Accessoires pour le Stirde™

De nombreux accessoires sont disponibles pour votre Golden Stride™. Veuillez contacter votre fournisseur agréé de Golden Technologies pour plus d'informations ou pour commander.

• Tube porte-canne	• Porte-béquille	• Fanion de sécurité
• Porte-gobelet	• Housse pour fauteuil électrique	• Ceinture de sécurité

Consignes de sécurité

Les symboles ci-dessous sont utilisés dans le manuel d'utilisation et/ou sur le produit pour identifier les avertissements et vous communiquer des informations importantes en matière de sécurité. Assurez-vous de les lire et de les comprendre entièrement.



AVERTISSEMENTS ! Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves. Cette icône est représentée par un symbole noir sur un triangle jaune avec une bordure noire.



OBLIGATOIRE ! Le non-respect des mesures obligatoires peut entraîner des blessures corporelles et/ou endommager l'équipement. Cette icône est représentée par un symbole blanc sur un point bleu avec une bordure blanche.



INTERDIT ! Indiquez une (des) action(s) qui ne doit (doivent) en aucun cas être effectuée(s). Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles et/ou endommager l'équipement. Cette icône est représentée par un cercle rouge et une barre rouge.

Symboles de sécurité

Les symboles ci-dessous identifient les avertissements, les actions obligatoires et les actions interdites. Elles figurent dans le manuel d'utilisation et/ou sur le produit. Assurez-vous de bien comprendre toutes les étiquettes de sécurité avant d'utiliser le produit. Ne pas retirer les étiquettes de sécurité du produit.



Lisez et respectez le manuel d'utilisation !



Utilisez uniquement des batteries au lithium-ion



Risque de pincement/écrasement



Produits chimiques corrosifs à l'intérieur de la batterie !



Risques d'explosion !



Éviter les émetteurs !



Ne pas jeter à la poubelle !



Recycler



Utilisation à l'intérieur uniquement !



Surface chaude !



Risque électrique !



N'utilisez pas d'appareils électroniques personnels !

I. INTRODUCTION

II. SÉCURITÉ

Votre Golden Stride™ est un véhicule fonctionnant sur batterie. Veuillez faire preuve de prudence et d'attention lorsque vous l'utilisez. En conduisant votre Stride™ de manière prudente et réfléchie, vous contribuez à votre sécurité personnelle et à celle des autres.



Lisez et suivez le manuel du propriétaire avant d'utiliser votre fauteuil électrique.

NOTICE Avant d'apprendre à utiliser votre Stride™, demandez à votre représentant de Golden Technologies, Inc. de déterminer s'il est souhaitable que vous vous entraîniez à monter et descendre de votre fauteuil électrique et à l'utiliser en présence d'un accompagnateur.

AVANT de monter sur votre Stride™

- Vérifier que l'alimentation est bien coupée. Voir la section "Fonctionnement" aux pages 21-27. Vous éviterez ainsi d'activer accidentellement le joystick et de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Vérifiez que votre Stride™ n'est pas en mode roue libre. Voir la section "Fonctionnement" aux pages 21-27.
- Relevez les accoudoirs.
- Relevez le repose-pied.

Monter sur votre Stride™

- Installez-vous confortablement et en toute sécurité sur le siège.
- Abaissez le repose-pied.
- Abaissez les accoudoirs.
- Fermez la ceinture de sécurité.

Descendre de votre Stride™

- Assurez-vous que l'appareil est hors tension.
- Détachez la ceinture de sécurité.
- Relevez les accoudoirs.
- Relevez le repose-pied.
- Levez-vous avec précaution et éloignez-vous du fauteuil.

POIDS MAXIMUM

Votre Stride™ a été conçu pour une charge utile maximale (passager et tout ce qui est transporté sur le fauteuil roulant électrique) de 265 livres. Le dépassement du poids maximum autorisé annule la garantie.



WARNING Le dépassement de la capacité de charge maximale annule la garantie et peut entraîner des blessures pour vous-même et/ou d'autres personnes.

II. SÉCURITÉ

CONDUITE EN PENTE

- Conduisez avec prudence lorsque vous tentez de négocier une pente, même une rampe d'accès pour handicapés.
- Essayez de garder votre Stride™ en mouvement lorsque vous montez une pente. Si vous vous arrêtez, redémarrez et accélérez lentement et prudemment.



- Il faut toujours monter ou descendre une pente en conduisant en ligne droite vers le haut ou vers le bas.
- Ne traversez pas ou ne conduisez pas en travers d'une pente.
- N'essayez pas de négocier une pente couverte de neige, de glace, d'herbe coupée ou mouillée, de feuilles ou de toute autre matière potentiellement dangereuse.
- Ne pas reculer sur une pente.
- N'essayez pas de descendre ou de monter une pente dont l'inclinaison est supérieure à l'inclinaison maximale recommandée de 6 degrés.



Si, pendant que vous descendez une pente, votre fauteuil électrique commence à se déplacer plus vite que vous ne le pensez, relâchez le joystick et laissez votre Stride™ s'arrêter. Lorsque vous sentez que vous avez repris le contrôle de votre fauteuil électrique, poussez le joystick vers l'avant et continuez à descendre le reste de la pente en toute sécurité.

MÉDICATIONS

Consultez toujours votre médecin pour savoir si les médicaments que vous prenez peuvent affecter votre jugement et/ou votre capacité à utiliser votre Stride™. Vérifiez également auprès de votre médecin si vous êtes en mesure d'utiliser un fauteuil électrique.

II. SÉCURITÉ

RÈGLES DE SÉCURITÉ



WARNING

- N'essayez pas d'utiliser votre Stride™ sur un escalier roulant. Utilisez toujours un ascenseur.
- Ne transportez pas de passagers sur votre fauteuil électrique.
- N'utilisez pas votre Stride™ s'il ne fonctionne pas correctement.
- Soyez prudent lorsque vous conduisez sur des surfaces molles ou irrégulières telles que l'herbe, le gravier et sur des terrasses dépourvues de garde-corps.
- Ne conduisez jamais sur la chaussée, sauf si vous devez traverser la rue.
- Traversez toujours les rues aux intersections et empruntez l'itinéraire le plus direct, en veillant à ce que votre chemin soit dégagé et que vous soyez visible de la circulation automobile.
- Il n'est pas recommandé de faire monter ou descendre votre Stride™ sur une marche ou un trottoir d'une hauteur supérieure à 1,5 pouce.
- Ne reculez jamais en montant ou en descendant une marche ou une bordure.
- N'utilisez jamais votre Stride™ lorsque vous êtes sous l'influence de l'alcool.
- Ne pas utiliser ou ranger le fauteuil électrique dans un endroit où il sera exposé à la pluie, à la neige, au brouillard et à des températures inférieures au point de congélation.
- N'utilisez pas votre fauteuil électrique sur des surfaces glissantes, verglacées ou salées.
- Ne vous asseyez jamais sur votre fauteuil électrique lorsqu'il est en roue libre et qu'il se trouve sur une pente.
- Ne modifiez pas votre fauteuil électrique d'une manière qui n'est pas autorisée par Golden Technologies, Inc.
- Ne pas démonter le pneu. En cas de démontage, demandez à votre fournisseur agréé Golden Technologies d'effectuer les opérations d'entretien ou de réparation nécessaires.
- N'essayez pas de gonfler les pneus de votre Stride™. Votre fauteuil électrique est équipé de pneus sans crevaisson remplis de mousse qui n'ont pas besoin d'être gonflés.
- Ne vous asseyez jamais sur votre Stride™ lorsqu'il est transporté.
- Attachez toujours votre Stride™ à l'aide d'un système d'arrimage approuvé lors du transport de votre fauteuil électrique.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez votre Stride™ en portant des vêtements longs et amples ou des vêtements avec des ceintures lâches, qui pourraient s'emmêler dans les roues du fauteuil électrique.
- Gardez toujours les pieds fermement posés sur la surface du repose-pied lorsque vous utilisez votre Stride™ afin d'éviter que vos pieds ne s'emmêlent dans les roues du fauteuil électrique.



WARNING Ce produit contient des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme étant à l'origine de cancers, de malformations congénitales ou d'autres troubles de la

II. SÉCURITÉ

reproduction.

Veillez à respecter ces avertissements importants en matière de sécurité.



WARNING Ne jamais transférer sur ou hors de ce fauteuil roulant électrique en utilisant le dossier du siège comme support pendant le transfert. Cela pourrait vous faire perdre l'équilibre et entraîner des BLESSURES.



WARNING Ne modifiez pas votre fauteuil électrique d'une manière qui n'est pas autorisée par Golden

Technologies, Inc.



WARNING Ne connectez pas et ne permettez à personne d'autre qu'un représentant autorisé de Golden Technologies de connecter un appareil électrique ou mécanique à votre Stride™. Les accessoires non autorisés annulent la garantie et peuvent provoquer des blessures.

Veillez à respecter cet avertissement important si vous rencontrez un problème avec votre appareil de mobilité.



WARNING Si vous rencontrez un problème dans le fonctionnement de votre appareil de mobilité, tel qu'un problème mécanique ou électrique, cessez immédiatement d'utiliser le produit. Retirez la batterie du fauteuil roulant électrique, puis contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté votre appareil de mobilité pour qu'il évalue le problème et le répare si nécessaire.

Règlementation FCC Partie 15

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.



WARNING Tout changement ou modification de cet appareil non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité peut annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, les utilisateurs sont encouragés à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des

II. SÉCURITÉ

mesures suivantes : (1) Réorienter ou déplacer l'antenne de réception. (2) Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur. (3) Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché. (4) Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

III. EMI/RFI

Le développement rapide de l'électronique, en particulier dans le domaine des communications, a saturé notre environnement d'ondes électromagnétiques (radio) émises par les émetteurs de télévision, les téléphones cellulaires, les radios communautaires (CB), les radios amateurs (HAM), les liaisons informatiques sans fil, les émetteurs de micro-ondes, les émetteurs de radiomessagerie, etc. Ces ondes électromagnétiques (EM) sont invisibles et leur intensité augmente à mesure que l'on se rapproche de la source d'émission. Lorsque ces ondes d'énergie agissent sur des appareils électriques et provoquent un dysfonctionnement ou un fonctionnement erratique ou incontrôlé, on parle d'interférences électromagnétiques (EMI) ou d'interférences de radiofréquences (RFI).

EMI/RFI ET VOTRE STRIDE™

Tous les véhicules électriques, y compris les fauteuils électriques, sont sensibles aux EMI/RFI. Cette interférence pourrait entraîner un mouvement anormal ou involontaire de votre Golden Stride™.



WARNING

Un mouvement involontaire ou le desserrage des freins peut provoquer un accident ou des blessures.

La FDA a déterminé que chaque marque et modèle de fauteuil électrique peut résister aux EMI/RFI à un certain niveau. Plus le niveau d'immunité est élevé, plus le degré de protection contre les EMI/RFI est important, mesuré en volts par mètre (V/m). La FDA a également déterminé que la technologie actuelle est capable de fournir une immunité de 20 V/m aux EMI/RFI, ce qui offrirait une protection utile contre les sources courantes d'interférence. Ce produit a été testé et a passé un niveau d'immunité de 20 V/m.

RECOMMANDATIONS EMI/RFI



INTERDIT ! N'allumez pas et n'utilisez pas d'appareils de communication électronique portatifs tels que des téléphones cellulaires, des talkies-walkies ou des radios CB lorsque votre fauteuil électrique est en marche.

- Soyez attentif à tout émetteur proche (radio, télévision, micro-ondes, etc.) sur votre itinéraire prévu et évitez d'utiliser votre fauteuil électrique à proximité de l'un de ces émetteurs.
- Éteignez l'appareil si votre Stride™ doit rester en position stationnaire pendant un certain temps.
- Sachez que l'ajout d'accessoires ou de composants ou la modification de votre fauteuil électrique peut le rendre plus sensible aux EMI/RFI.
- En cas de mouvement involontaire ou de relâchement des freins, éteignez votre fauteuil électrique dès que vous pouvez le faire en toute sécurité.
- Signalez tout incident de mouvement involontaire ou de défaillance des freins à votre représentant Golden Technologies ou à Golden Technologies.



WARNING

Éteignez votre fauteuil électrique dès que cela est possible en toute sécurité si un mouvement involontaire ou incontrôlable se produit ou si un relâchement involontaire des freins se produit.

IV. SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle	GP301
Code de l'assurance-maladie	Aucun(e)
Capacité de poids	265 lbs.
Roues motrices	Arrière
Vitesse maximale	3,7 mph
Plage de fonctionnement ¹	9,3 mi.
Garde au sol	1,6"
Rayon de braquage	23,6"
Type de batteries	Batterie lithium-ion 24V 10AH
Couleurs	Noir
Mode roue libre	Oui
Contrôle électronique de la vitesse	Oui
Freins électromécaniques	Oui
Chargeur	2 AMP Hors carte
Contrôleur	50 AMP
Moteur	24V/200W*2
Longueur	42.5", plié-15.7"
Largeur	24.4", plié-24.4"
Hauteur (du sol au sommet du dossier du siège)	38.6", plié-32.7"
Sol jusqu'au sommet du siège	22"
Du repose-pied au sommet du siège	15,7"
De l'assise au sommet de l'accoudoir	9,1"
De l'avant de l'accoudoir au dossier	14,6"
Poids de l'unité : (assemblé)	58 lbs.
Batteries	3,8 lbs. (paquet)
Pneus :	Libre plat
Roues motrices (arrière)	12"
Roulettes (avant)	8"
Roues anti-bascule arrière	2"
Siège :	Dossier avec coussin d'assise amovible
Hauteur du dossier	16"
Largeur du siège	17"
Profondeur du siège	18"
Couleur	Noir et gris bicolore
Repose-pieds :	Pliage
Garantie :	
Cadre	5 ans
Groupe motopropulseur	13 Mois
Électronique ²	13 Mois
Batteries	12 Mois

1. L'autonomie de la batterie est de 200 livres et varie en fonction du poids du conducteur, de la surface de déplacement, du terrain et du type de batterie.

2. La garantie de l'électronique exclut les batteries.

V. PRINCIPAUX

Composants principaux

1. Cadre (pliant)
2. Repose-pied (pliant)
3. Poignée de poussée
4. Batterie (Lithium-Ion)
5. Coussins de siège
6. Coussin de dossier avec pochette de rangement
7. Assemblage du bras (2)
8. Joystick
9. Sac de rangement (sous le siège)
10. Roues pivotantes (2)
11. Roues motrices (2)
12. Roues anti-basculement réglables (2)
13. Ceinture abdominale
14. Levier de roue libre (2)
15. Chargeur externe (non illustré)
16. Drapeau de sécurité (non illustré)
17. Sangle velcro (non illustrée)



figure 1

VI. MONTAGE ET PLIAGE DE VOTRE Stride™

Votre Stride™ est expédié partiellement démonté afin de maximiser la protection de toutes ses pièces pendant le processus d'expédition. Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour assembler rapidement et facilement le fauteuil électrique pour votre utilisation.




WARNING

Si vous ne vous sentez pas capable d'assembler votre fauteuil électrique en toute sécurité, veuillez contacter votre représentant ou revendeur local de Golden Technologies, Inc.

VII. FONCTIONNEMENT

Avant d'assembler votre Stride™, assurez-vous de connecter le faisceau de la batterie situé derrière la porte de l'appareil

Votre Stride™ ne s'allumera pas et ne fonctionnera pas sans cette étape. Voir figure 2.


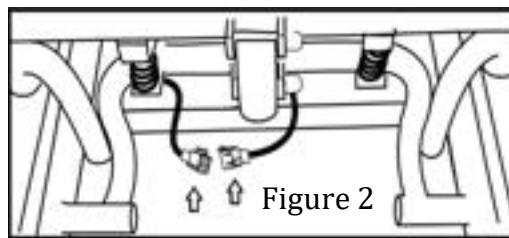


WARNING Le Stride™ pèse environ 55 livres. Demandez de l'aide si vous ne vous sentez pas capable de soulever un tel poids en toute sécurité.

Pour assembler :

Lorsque l'appareil est en position debout repliée, procédez comme suit.

1. Déplacez le repose-pied pour accéder à l'emplacement du bloc-batterie.
2. Alignez le bloc-batterie avec le rail sous le siège. Tout en appuyant sur le loquet du bloc-batterie, faites-le glisser vers l'avant jusqu'à ce qu'il s'arrête. Relâchez le loquet pour verrouiller le bloc-batterie. Voir figure 3.

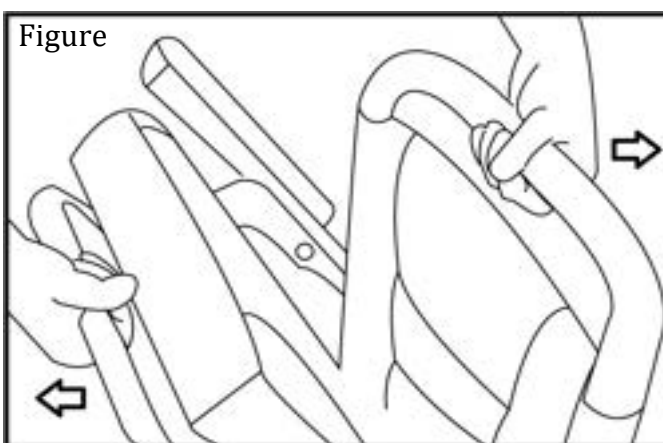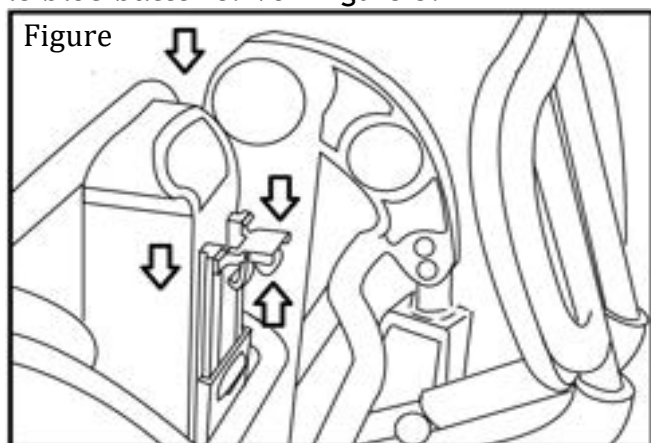

3. Avec une main sur la poignée de poussée du dossier et l'autre main sur le tube d'assise, tirez dans des directions opposées pour déplier le fauteuil roulant électrique. Remarque : Un "clic" audible indique que le loquet s'est enclenché et qu'il est maintenant en position verrouillée. Voir figure 4.




WARNING Il existe des points de pincement, c'est pourquoi le positionnement de la main est essentiel. Vous pouvez vous blesser si vous ne suivez pas la recommandation de placement des mains à l'étape 3 ci-dessus.

4. Desserrez le bouton de l'accoudoir, insérez le joystick et réglez-le à une longueur confortable pour vous, puis serrez le bouton pour fixer le joystick. (Remarque : le joystick peut être installé sur le bras gauche ou droit, selon votre préférence). Voir figure 5.



WARNING Assurez-vous que le câble du joystick est bien fixé à l'appareil et qu'il ne peut pas traîner

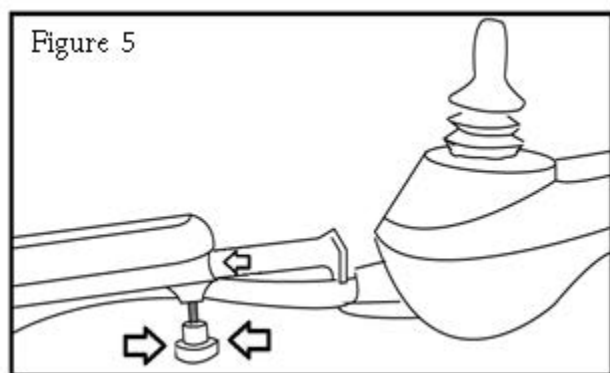

VII. FONCTIONNEMENT



sur le sol ou s'emmêler dans des objets environnants lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

5. Appuyez sur le loquet de l'un des supports anti-basculement, qui se trouvent à l'intérieur des roues arrière, sous les moteurs. Déployez complètement la pointe de la fourche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Voir figure 6. Répéter l'étape 5 pour l'anti-pointe opposée.



WARNING Les deux supports anti-basculement doivent être complètement déployés et verrouillés. Le non-respect de cette consigne peut entraîner le basculement du fauteuil roulant électrique et des blessures graves pour vous et les personnes à proximité.

6. Placez les deux leviers de roue libre en position de conduite. Remarque : Le fauteuil roulant électrique ne roule pas en roue libre. Voir figure 7.

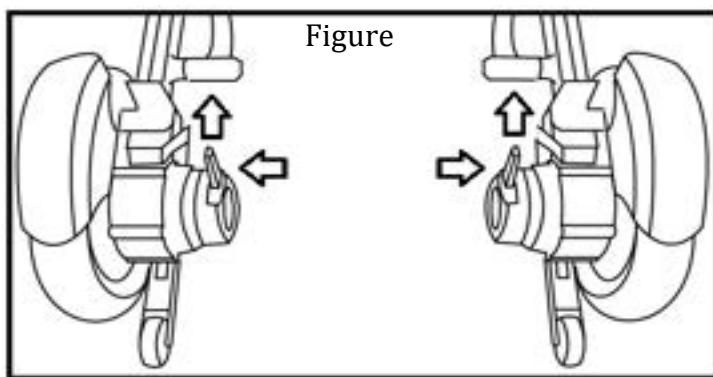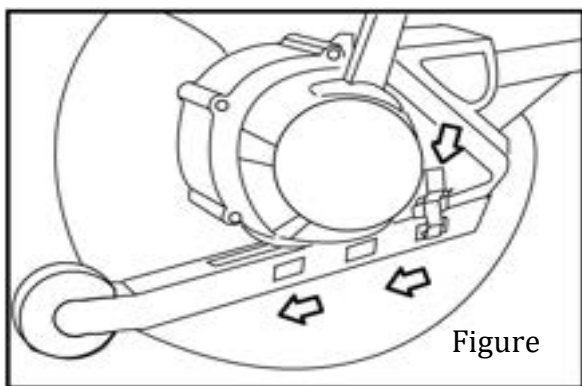


Le fauteuil roulant électrique peut être plié afin de réduire son volume pour le transport ou le stockage.

Pliage :

1. Mettez le fauteuil roulant hors tension.

2. Placez les deux leviers de roue libre en position avant ou en position de conduite. Voir figure 6.


3. Poussez le dossier vers le bas, tirez le loquet vers le haut (voir figure 8) ; pliez le fauteuil roulant en poussant le dossier d'une main et en plaçant l'autre main sur le tube d'assise. Voir figure 3.

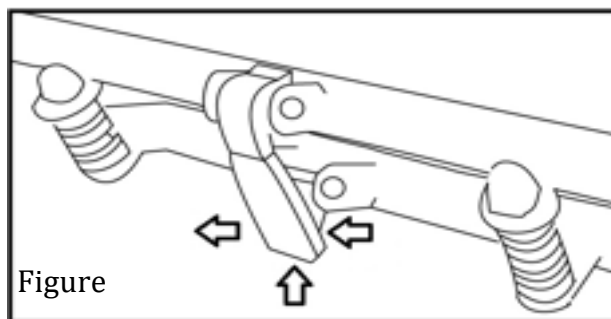

WARNING Les deux supports anti-basculement doivent être complètement déployés et verrouillés pour permettre au fauteuil roulant électrique de se tenir debout lorsqu'il est en position pliée. Le non-respect de cette règle entraînera le basculement et la chute du fauteuil roulant électrique. Cela peut entraîner des blessures graves pour vous et les personnes qui se trouvent à proximité.

VII. FONCTIONNEMENT

4. Relevez le repose-pied. Voir figure 9.

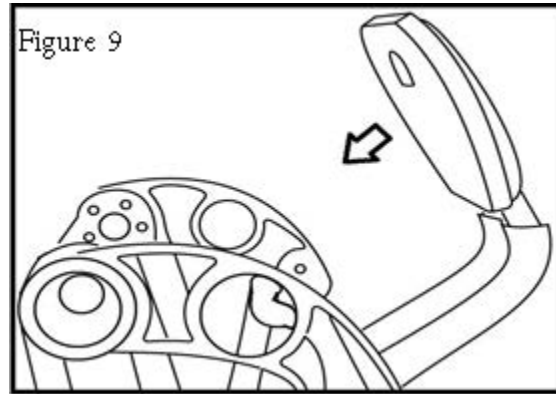

Lisez et suivez le manuel d'utilisation.

Votre Stride™ est simple à utiliser. Cependant, pour votre sécurité et celle des autres, Golden Technologies, Inc. vous recommande de lire attentivement et de comprendre les instructions d'utilisation suivantes. Nous vous recommandons également de vous entraîner à utiliser votre Stride™ dans une zone libre de tout obstacle. Une fois que vous aurez pris confiance dans votre capacité à contrôler votre fauteuil roulant électrique, vous pourrez plus facilement l'utiliser dans les conditions normales de la vie quotidienne.

⚠ CAUTION Avant de conduire votre Stride™ prenez note de votre environnement et réglez votre vitesse en conséquence. Voir figure 10. Pour la conduite en intérieur, nous vous recommandons de sélectionner la vitesse la plus basse. Pour la conduite à l'extérieur, nous vous recommandons de choisir une vitesse à laquelle vous vous sentez à l'aise, en sécurité et maître de votre fauteuil roulant électrique. Familiarisez-vous avec les caractéristiques de votre Stride™ décrites ci-dessous et suivez les instructions pour utiliser votre fauteuil roulant électrique en toute sécurité.

VII. FONCTIONNEMENT

 **WARNING** La surface du joystick peut potentiellement chauffer lorsqu'elle est exposée à une forte lumière solaire pendant de longues périodes.

Caractéristiques du contrôleur

Jauge de batterie : Cette jauge affiche 5 LED (1 rouge, 2 jaunes et 2 vertes) lorsqu'elle est complètement chargée. La couleur et le nombre de LED allumées sont une indication directe de la charge de vos batteries. Le VERT indique un bon état de charge, le JAUNE indique un état d'alerte et le ROUGE indique qu'une charge est nécessaire pour que votre fauteuil roulant électrique puisse continuer à fonctionner.

Bouton d'alimentation : Cet interrupteur alimente le système de contrôle. Cet interrupteur permet d'allumer et d'éteindre le fauteuil roulant électrique dans des circonstances normales. N'utilisez pas le bouton d'alimentation pour arrêter le fauteuil roulant électrique, sauf en cas de situation d'URGENCE.

Bouton de klaxon : Le klaxon retentit lorsque vous appuyez sur ce bouton.

Réseau de LED de réglage de la vitesse : Ce tableau indique la vitesse maximale actuelle de votre fauteuil roulant électrique. Ce réglage de la vitesse peut être ajusté par l'utilisateur à l'aide du bouton d'augmentation ou de réduction de la vitesse.

Bouton d'accélération : En appuyant sur ce bouton, vous augmentez la vitesse maximale de votre fauteuil roulant électrique.

Bouton de réduction de la vitesse : En appuyant sur ce bouton, vous diminuez la vitesse maximale de votre fauteuil roulant électrique.

Joystick : Le joystick est utilisé pour contrôler le mouvement du fauteuil roulant électrique, y compris sa vitesse et sa direction. Plus vous éloignez le joystick de sa position centrale, plus le fauteuil roulant électrique se déplace rapidement. Lorsque vous relâchez le joystick, il revient automatiquement en position centrale et le frein s'enclenche pour arrêter le fauteuil roulant électrique.

Prise pour chargeur : Situé à l'avant du contrôleur, il sert à charger les batteries en connectant uniquement le chargeur de batterie fourni.

Port USB : Situé à l'avant du contrôleur, il est utilisé pour charger les appareils intelligents tels que les téléphones ou les tablettes.

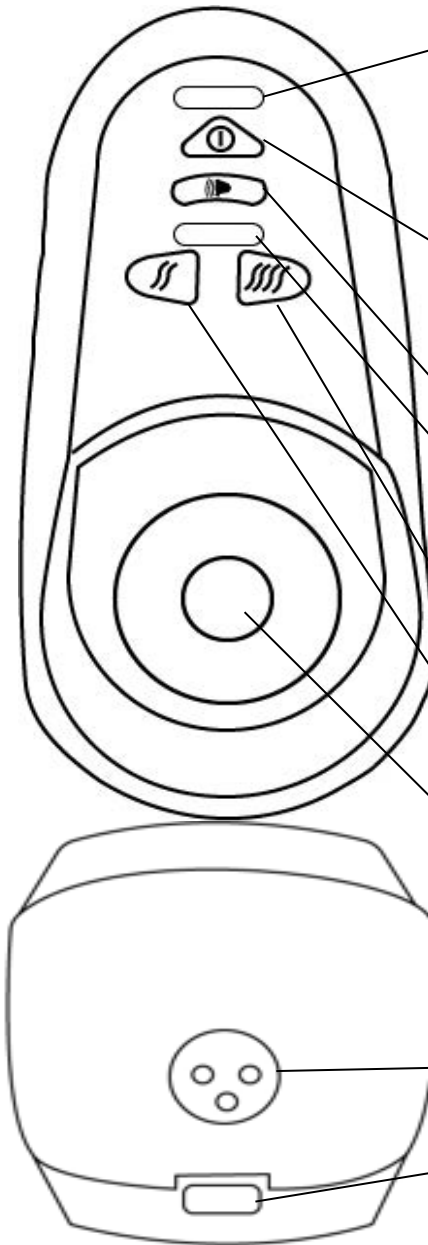


Figure
10

VII. FONCTIONNEMENT

BLOC-BATTERIE ET RECHARGE

L'entretien de la batterie est la partie la plus importante de l'entretien de votre fauteuil roulant électrique. Le fait de maintenir le bloc-batterie complètement chargé permet de prolonger la durée de vie de la batterie. Suivez les conseils suivants pour maintenir votre batterie dans un état optimal.

IMPORTANT ! Chargez complètement le bloc-batterie avant sa première utilisation. Cela permet à la batterie d'atteindre environ 90 % de son niveau de performance maximal. Après chaque utilisation, chargez la batterie pendant 5 à 8 heures. Après environ quatre ou cinq cycles de charge, la batterie atteindra 100 % de charge et durera plus longtemps.

- Les batteries doivent être chargées au maximum pour une utilisation quotidienne. Nous vous recommandons de brancher le chargeur externe après chaque utilisation et de le charger pendant 5 à 8 heures.
- Si vous n'utilisez pas le fauteuil roulant électrique pendant plus d'une semaine, chargez complètement la batterie, puis retirez-la du fauteuil roulant électrique.

 **WARNING** N'utilisez que le chargeur externe fourni pour toutes les opérations de chargement. L'utilisation de tout autre chargeur peut provoquer une situation dangereuse entraînant des blessures corporelles, des blessures à autrui et des dommages matériels.

CHARGEMENT DE LA BATTERIE

Votre système de charge Stride™ est conçu pour votre sécurité et votre confort. Suivez les étapes ci-dessous pour recharger la batterie.


Chargement :

1. Positionnez votre Stride™ à proximité d'une prise électrique murale standard.
2. Mettez le joystick hors tension et placez le fauteuil roulant électrique en mode conduite.


 **WARNING** Le chargeur ne doit pas être branché sur une prise électrique ni mis sous tension à ce stade du processus. Veuillez vérifier avant de poursuivre.

3. Insérez la fiche du chargeur correspondant dans la prise de charge du contrôleur, située à l'avant du contrôleur, ou dans le bloc-batterie. Voir figure 11 & 12.

Remarque : La méthode alternative de chargement du bloc-batterie nécessite de retirer le bloc-batterie du fauteuil roulant électrique avant le chargement.

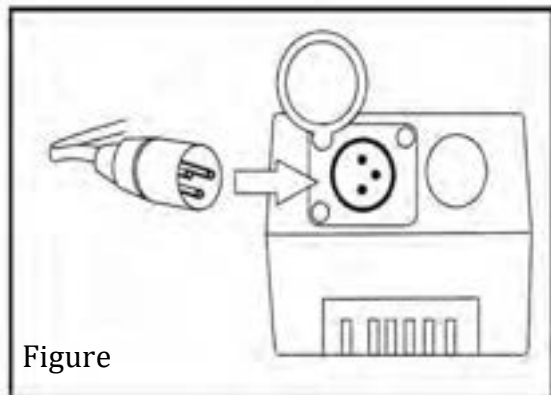

Figure

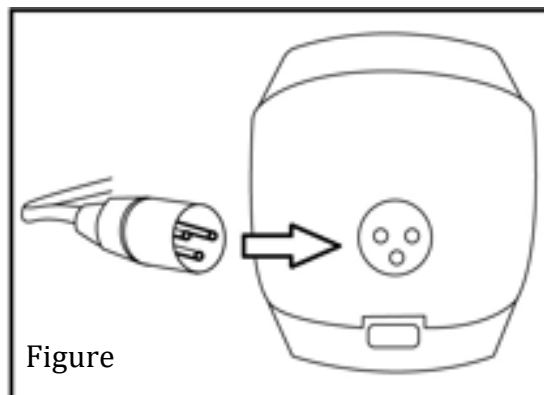

Figure

VII. FONCTIONNEMENT



WARNING Si vous n'alignez pas et/ou n'insérez pas la fiche dans le bon sens, vous risquez d'endommager le contrôleur et de rendre votre fauteuil roulant électrique inutilisable.

4. Insérez la fiche à l'autre extrémité du cordon d'alimentation du chargeur dans une prise électrique murale standard. Le témoin lumineux du chargeur s'allume en BLEU pendant la charge et en VERT lorsqu'il est complètement chargé.

Remarque : La jauge de la batterie indique que le système est en cours de charge en passant d'une séquence lumineuse de gauche à droite, puis en affichant l'état de charge approximatif de la batterie à la fin de la séquence. La conduite est empêchée (inhibée) pendant que le système est en cours de charge. Il n'est pas nécessaire que le système soit sous tension pour charger la batterie, mais s'il n'est pas sous tension, la jauge de la batterie n'affichera pas l'état de charge/la séquence lumineuse.

5. Débranchez le cordon d'alimentation du chargeur de la prise murale et de la prise du chargeur du contrôleur ou du bloc-batterie pour (méthode de charge alternative) lorsque les batteries sont complètement chargées.

ROULEZ AVEC VOTRE Stride™

Votre Stride™ est simple à utiliser. Cependant, pour votre sécurité et celle des autres, Golden Technologies, Inc. vous recommande de lire attentivement et de comprendre les instructions d'utilisation suivantes. Nous vous recommandons également de vous entraîner à utiliser votre Stride™ dans une zone libre de tout obstacle. Une fois que vous aurez pris confiance dans votre capacité à contrôler votre fauteuil roulant électrique, vous pourrez plus facilement l'utiliser dans les conditions normales de la vie quotidienne.



WARNING Coupez toujours l'alimentation en appuyant sur le bouton d'alimentation du contrôleur avant de monter ou de descendre du fauteuil roulant électrique. Le non-respect de cette consigne peut entraîner une activation involontaire du joystick, entraînant le déplacement du fauteuil roulant électrique et des risques de blessures pour vous et/ou les personnes qui vous entourent.



WARNING Assurez-vous toujours que les leviers de roue libre sont en position "DRIVE" avant d'entrer dans le fauteuil roulant électrique ou d'en sortir. Le non-respect de cette consigne peut entraîner le déplacement du fauteuil roulant électrique et provoquer des blessures.

Pour conduire :

1. Assurez-vous que le fauteuil roulant électrique est en position "OFF".
2. Assurez-vous que les deux leviers de roue libre sont en position "DRIVE".
3. Soulever le repose-pied.



WARNING Ne vous tenez jamais sur le repose-pied et n'utilisez pas le repose-pied comme aide pour monter dans le fauteuil roulant électrique. L'utilisation du repose-pied de cette manière peut provoquer une instabilité et entraîner des blessures.

VII. FONCTIONNEMENT

4. Détachez la ceinture de sécurité (si ce n'est pas déjà fait) pour dégager la surface d'assise.

5. En vous tenant à côté du fauteuil roulant électrique, appuyez sur le bouton de déverrouillage ROUGE situé sous le bras correspondant et soulevez le bras pour le dégager de votre chemin.

Voir figure 13.

6. Installez-vous confortablement et en toute sécurité sur le siège.

7. Fermez la ceinture de sécurité.

8. Pousser le bras vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Remarque : Un clic audible se fait entendre lorsque le bras se verrouille en place.

9. Appuyez sur le bouton d'alimentation du contrôleur.

Le klaxon retentit une fois, puis la jauge de la batterie s'allume.

10. Sélectionnez votre vitesse en appuyant sur l'un des boutons de vitesse.



WARNING Si vous n'êtes pas sûr de vous, commencez par la vitesse la plus faible.

11. Commander les mouvements du fauteuil roulant électrique à l'aide du joystick. Voir figure 14.



WARNING Plus vous éloignez le joystick de sa position centrale, plus le fauteuil roulant électrique se déplace rapidement.

DESCENDRE de votre Stride™

1. Arrêter complètement le fauteuil roulant électrique.


2. Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre.

3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage ROUGE situé sous le bras correspondant et soulevez le bras pour le dégager de votre chemin.


4. Détachez la ceinture de sécurité.

5. Soulever le repose-pied.

6. Levez-vous avec précaution et éloignez-vous du fauteuil roulant électrique.

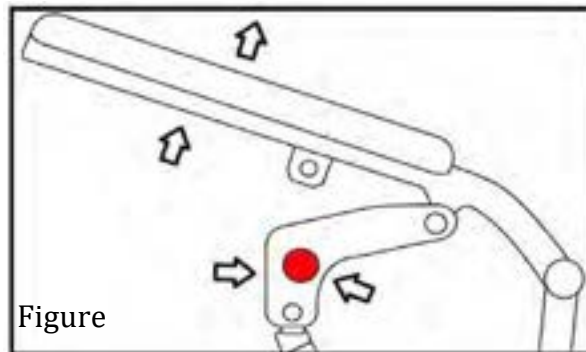

Figure

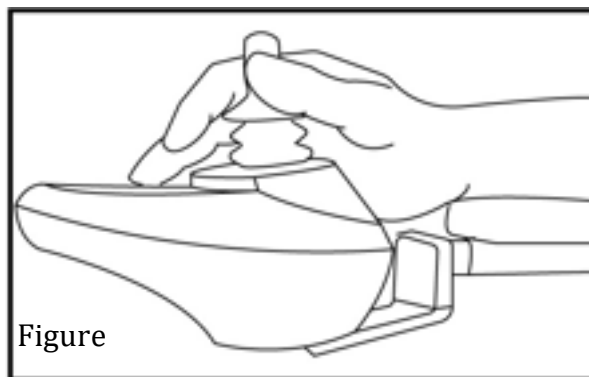

Figure

VII. FONCTIONNEMENT

CONTRÔLE DANS LES ESPACES RESTREINTS

Lorsque vous utiliserez votre Stride™ pour accroître votre mobilité, vous rencontrerez sans aucun doute des obstacles qu'il vous faudra pratiquer pour les franchir en douceur et en toute sécurité. Vous trouverez ci-dessous quelques obstacles courants que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation quotidienne de votre fauteuil roulant électrique. Ces obstacles sont accompagnés de quelques conseils de conduite qui devraient vous aider à les surmonter. Apprenez et suivez ces conseils et, avec une facilité surprenante, vous contrôlerez bientôt votre fauteuil électrique en le manœuvrant à travers les portes, en montant et en descendant les rampes, en montant et en franchissant les bordures, dans l'herbe et le gravier, et en montant et en descendant les pentes.

Portes

- Approchez-vous lentement d'une porte que vous ne connaissez pas.
- Vérifiez si la porte est munie d'un bouton ou d'une barre de poussée.
- Déterminez si la porte s'ouvre dans votre direction ou à l'opposé de vous.
- N'essayez pas d'utiliser votre propre force pour ouvrir la porte. Apprenez à utiliser la puissance de votre fauteuil roulant électrique pour faire la majorité du travail à votre place.

Si la porte s'ouvre dans la direction opposée à la vôtre :

1. Utilisez une main pour tourner le bouton de la porte ou pour actionner la barre de poussée.
2. Utilisez votre autre main pour contrôler le fauteuil électrique en actionnant doucement la commande pour faire avancer lentement votre fauteuil électrique.
3. Utilisez votre bras pour pousser doucement la porte.
4. Passez la porte.
5. S'il s'agit d'une porte à fermeture automatique, elle se fermera derrière vous.
6. S'il ne s'agit pas d'une porte à fermeture automatique, arrêtez votre fauteuil électrique lorsqu'il est dégagé de la porte et utilisez votre main pour pousser la porte vers la fermeture.

Si la porte s'ouvre dans votre direction :

1. Utilisez une main pour tourner le bouton de la porte ou pour tirer la poignée.
2. Gardez votre main sur le bouton de la porte ou sur la poignée.
3. Utilisez l'autre main pour contrôler le fauteuil roulant électrique en actionnant doucement le joystick pour le faire reculer lentement.
4. Laissez la puissance de votre Stride™ ouvrir complètement la porte.
5. Lorsque la porte est complètement ouverte, arrêtez votre fauteuil roulant électrique.
6. Traversez la porte tout en gardant votre main sur la porte pour éviter qu'elle ne heurte ou ne bloque votre fauteuil roulant électrique.
7. S'il s'agit d'une porte à fermeture automatique, elle se fermera derrière vous. S'il ne s'agit pas d'une porte à fermeture automatique, tirez-la derrière vous.
8. S'il ne s'agit pas d'une porte à fermeture automatique, tirez-la derrière vous.

Rampes

Conformément à l'American Disabilities Act (ADA), de nombreux bâtiments sont équipés de rampes d'accès pour les fauteuils roulants électriques et les autres véhicules de mobilité. En comprendre les sections "Règles de sécurité" et "Conduite sur une ligne" de ce manuel.



VIII. DIAGNOSTIC DES DÉFAUTS ET DÉPANNAGE

Pour votre confort, le *Stride™* est doté d'un système d'alerte automatique en cas de défaillance. Si, lors de la mise sous tension, le système présente une anomalie, le klaxon émet un signal d'alarme correspondant. Le klaxon émet deux bips pour signaler un défaut, suivis du nombre de bips indiquant le type de défaut. Ils sont décrits dans le tableau ci-dessous.

CODE BIP	DIAGNOSTIC DES DÉFAUTS	DÉPANNAGE
1 bip	Connexion du joystick/contrôleur	Vérifier la connexion du contrôleur. Vérifier que le faisceau n'est pas endommagé.
2 bips	Défaut du moteur droit	Vérifier le bon moteur et le bon faisceau de câbles.
3 bips	Défaut du frein droit	Assurez-vous que le levier de frein droit est en position "DRIVE". Vérifiez que le frein droit et le faisceau ne sont pas endommagés.
4 bips	Défaut du moteur gauche	Vérifiez le moteur gauche et le faisceau de câbles.
5 bips	Défaut du Freins gauche	Assurez-vous que le levier de frein gauche est en position "DRIVE". Vérifiez que le frein gauche et le faisceau ne présentent pas de dommages physiques.
6 bips	Surintensité du contrôleur	Assurez-vous que les freins gauche et droit se desserrent et s'enclenchent lors de l'utilisation du fauteuil roulant électrique. Dépassement de la capacité de poids maximale (265 lb) ou de l'inclinaison maximale de 6 degrés. Éteindre le contrôleur et le laisser refroidir. Réduisez le poids et/ou le degré d'inclinaison lorsque vous utilisez le fauteuil roulant électrique.
7 bips	Défaut du joystick	Assurez-vous que le joystick revient en position centrale lorsqu'elle est relâchée.
8 bips	Défaut du contrôleur	Défaillance du contrôleur même. Contactez votre représentant ou revendeur local de Golden Technologies, Inc.
9 bips	Basse tension, sous-tension	Rechargez la batterie. Remplacez la batterie si elle ne se charge pas ou ne tient pas la charge.

IX. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

ENTRETIEN DE ROUTINE

Votre fauteuil roulant électrique nécessite un minimum d'entretien et de maintenance. Si vous ne vous sentez pas capable d'effectuer les opérations d'entretien énumérées ci-dessous, vous pouvez programmer une inspection et un entretien avec votre revendeur.

- Veillez à ce que votre batterie soit complètement chargée chaque jour. Voir "Chargement de la batterie".
- Lorsqu'elle est éteinte, vérifiez quotidiennement que le joystick n'est pas endommagé et qu'il revient en position normale. Si vous constatez des défauts, contactez votre revendeur. N'essayez pas de la réparer vous-même !
- Inspecter quotidiennement le système d'assise, les accoudoirs et le repose-pied pour vérifier qu'il n'y a pas de pièces desserrées, d'usure excessive ou de dommages. Si vous constatez des défauts, contactez votre revendeur.
- Inspectez régulièrement les pneus de votre fauteuil roulant électrique pour détecter les signes d'usure.
- Inspectez régulièrement tous les harnais et connexions exposés pour vérifier qu'ils ne sont pas usés, endommagés ou corrodés. Demandez à votre revendeur de réparer ou de remplacer les faisceaux ou les connecteurs endommagés.
- Veillez à ce que les composants électriques (chargeur et commandes) ne soient pas exposés à l'humidité. Si ces éléments sont exposés à l'humidité, laissez-les sécher complètement avant d'essayer de faire fonctionner à nouveau votre fauteuil roulant électrique.
- Vérifiez périodiquement le serrage, l'usure et la corrosion de toutes les fixations. Si l'un de ces éléments est présent, éteignez le fauteuil roulant électrique et contactez votre revendeur.



WARNING

Faites attention aux points de pincement et aux pièces métalliques tranchantes (portez des gants).

- Tous les roulements de roue sont lubrifiés en permanence et scellés. Aucune lubrification supplémentaire n'est nécessaire.

Nous vous recommandons de vérifier les points suivants :

Bande de roulement : Effectuez régulièrement une inspection visuelle de la bande de roulement des pneus. Si la bande de roulement restante est inférieure à 1,5 cm, demandez à votre revendeur Golden local de remplacer les pneus usés.

Joystick de commande : Protéger le joystick des conditions météorologiques défavorables. L'humidité peut endommager le contrôleur et annuler la garantie de votre fauteuil roulant électrique.

Nettoyage : Nettoyez le corps de votre fauteuil roulant électrique avec un chiffon humide. Utilisez de l'eau froide mélangée à un savon doux pour éliminer la saleté et les huiles. Séchez avec un chiffon doux et propre. Polissez à la main avec un chiffon doux.



WARNING

N'utilisez pas d'eau courante pour nettoyer votre Stride™. L'eau et les températures extrêmes sont les principaux éléments qui peuvent nuire à votre fauteuil roulant électrique et à ses performances.

IX. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Eau, pluie, grésil et neige

L'eau, sous quelque forme que ce soit, provoque un dysfonctionnement électronique ou la corrosion des composants électriques, des connexions et du châssis du fauteuil.

Température

La température peut avoir un effet négatif sur les composants et les performances de votre fauteuil roulant électrique.



WARNING En cas de températures extrêmement basses, la batterie de votre fauteuil roulant électrique peut geler, empêchant votre Stride™ de fonctionner. Une batterie gelée ne peut pas être rechargée en toute sécurité. Ne pas utiliser le fauteuil roulant électrique si cette condition est présente, car cela crée un risque pour la sécurité.



WARNING À des températures extrêmement élevées, votre fauteuil roulant électrique peut fonctionner à des vitesses plus lentes en raison de la fonction de recul thermique du contrôleur qui est conçue pour éviter d'endommager les moteurs et les autres composants électriques du fauteuil.

Stockage

Votre Stride™ doit être stocké dans un environnement intérieur propre avec une température ambiante de 32° F - 122° F, une humidité relative $\leq 80\%$, avec une bonne ventilation.



WARNING Retirez le bloc-batterie du fauteuil roulant électrique avant de le ranger. Des produits chimiques corrosifs pourraient fuir et causer des dommages matériels.

X. GARANTIE



Garantie consommateur limitée

Fauteuils roulants électriques

Golden Technologies a fourni des informations dans ce manuel d'utilisation concernant l'utilisation et l'entretien de votre fauteuil roulant électrique. Le non-respect de ces informations annulera la garantie du fauteuil roulant électrique, de ses pièces et de la batterie fournie par Golden Technologies.

La garantie suivante n'est accordée qu'au consommateur INITIAL qui a acheté notre produit et prend effet à la date d'achat par le consommateur auprès d'un revendeur agréé de Golden Technologies. Le consommateur doit être en possession d'une carte d'enregistrement de la garantie déposée auprès de Golden Technologies pour bénéficier du service.

La garantie couvre les modèles de fauteuils roulants électriques suivants, sauf indication contraire :

- Stride™ GP301

Garantie limitée de cinq ans :

Pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériaux ou de fabrication, Golden Technologies réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout composant structurel du cadre jugé défectueux par un représentant autorisé de Golden Technologies :

- Cadre métallique* • Soudures du cadre*

Garantie limitée de treize mois

Pendant une période de treize mois à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériaux ou de fabrication, Golden Technologies réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout composant structurel du cadre jugé défectueux par un représentant autorisé de Golden Technologies :

- Poutre porteuse • Fourches anti-basculement • Fourches porteuses • Accoudoirs • Repose-pieds

Pendant une période de treize mois à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériaux ou de fabrication, Golden Technologies réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout composant de la chaîne cinématique jugé défectueux par un représentant autorisé de Golden Technologies :

- Assemblage moteur/boîte de vitesses • Assemblage frein (fonction électrique uniquement)

Remarque : Une augmentation du bruit de fonctionnement du moteur/de la boîte de vitesses NE CONSTITUE PAS un défaut. Avec l'usure normale, le bruit de fonctionnement devrait augmenter.

Pendant une période de treize mois à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériaux ou de fabrication, Golden Technologies réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout assemblage électronique suivant jugé défectueux par un représentant autorisé de Golden Technologies.

- Contrôleur électronique • Chargeur de batterie • Faisceau(x) de câbles (à l'exclusion des couvercles de coffre)

Remarque : Pendant la charge des batteries, il est normal que le chargeur chauffe. La chaleur dégagée par le chargeur de batterie NE CONSTITUE PAS un défaut.

Pendant une période de treize mois à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériaux ou de fabrication, Golden Technologies réparera ou remplacera, à sa discrétion, les pièces suivantes jugées défectueuses par un représentant autorisé de Golden Technologies :

- Roulements • Bagues
- Composants en caoutchouc (à l'exclusion des pneus et de toutes les pièces d'usure)
- Composants en plastique (à l'exclusion de la carrosserie et de toutes les pièces d'usure)

Garantie limitée de douze mois

Pendant une période de douze mois à compter de la date d'achat, en cas de défaut de matériel ou de fabrication, Golden Technologies remplacera les batteries fournies par Golden Technologies si un représentant autorisé de Golden Technologies constate qu'elles sont défectueuses.

01.26.2022

X. GARANTIE



Garantie limitée du consommateur

Fauteuil roulant électrique (suite)

Les éléments non mentionnés ou énumérés sont couverts à la discrétion de Golden Technologies. Tous les accessoires, standard ou optionnels, fournis par Golden Technologies, sont couverts pour une période d'un an à compter de la date d'achat de l'unité en question.

Exclusions de la garantie :

Golden Technologies n'offre aucune garantie sur les éléments suivants, qui peuvent nécessiter un remplacement en raison de l'usure normale liée à l'utilisation quotidienne :

- Pneus et chambres à air
- Caches en plastique ABS
- Coussinets d'accoudoir
- Balais du moteur
- Ampoules/fusibles
- Boîtiers de piles
- Plaquettes de frein
- Rembourrage

Cette garantie exclut également les éléments suivants :

- Perte ou vol de composants
- Dommages causés par :
 - Fuite ou écoulement du liquide de la batterie.
 - Abus, mauvaise utilisation, accident ou négligence.
 - Fonctionnement, entretien ou stockage inadéquats.
 - Utilisation commerciale ou autre que normale.
 - Réparations et/ou modifications apportées à toute pièce sans l'accord spécifique de Golden Technologies.
 - Dépassement de la capacité de charge spécifiée de l'appareil.
 - Les accessoires autres que ceux fournis ou approuvés par Golden Technologies.
 - Non-respect des instructions relatives au produit.
 - Actes de la nature, tels que la foudre, les tremblements de terre, etc....
 - Circonstances indépendantes de la volonté de Golden Technologies.
- TOUTE PIÈCE MODIFIÉE OU RÉPARÉE PAR UNE PERSONNE NON AUTORISÉE.

Service de garantie :

Le service de garantie doit être effectué par un représentant autorisé de Golden Technologies. Golden Technologies se réserve le droit de remplacer les pièces garanties par des pièces remises à neuf ou neuves, à sa discrétion. Tous les frais de main-d'œuvre, les appels de service, les coûts de transport ou tout autre frais associé à l'installation d'une ou de plusieurs pièces garanties sont à la charge du consommateur.

La garantie porte uniquement sur le remplacement des pièces et n'inclut pas les frais de transport des pièces de rechange. Les consommateurs ne doivent pas retourner d'articles à Golden Technologies sans autorisation écrite préalable. Tout dommage survenu pendant le transport des pièces garanties relève de la seule responsabilité du consommateur.

Il n'existe aucune autre garantie expresse.

Les garanties implicites, y compris celles de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, sont exclues. Toute responsabilité pour des dommages indirects est exclue.

Cette garantie vous donne des droits spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre.

Register Now *To Lock In Your Warranty* and Receive Important Product Updates
SAVE TIME - REGISTER ONLINE: WWW.GOLDENTECH.COM

Most Lift Chairs Have On Controller Wire or Back Rail of the Metal Frame
Most Scooters & Powerchairs On Seat Post, Under/On Battery, or Under Carpet

[illegible]

Most Scooters with G (GA, GB, GC, GL, GR, etc) Most Powerchairs with GP

[illegible][illegible]

LAST NAME

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible][illegible]

Enregistrez votre
produit en ligne.
Visitez
goldentech.com ou
scannez ce code QR

1 2 3 4 5

Pliez d'abord ici

Placez le
timbre ici

Golden
Technologies 401
Bridge Street Old
Forge, PA 18518

Pliez ensuite ici

GOLDEN *Stride*



Modèle



401 Bridge Street
Old Forge, PA 18518
Tél : 800-624-6374
Fax : 800-628-5165
www.goldentech.com