

Fauteuil releveur et inclinable

MANUEL D'UTILISATION MAXICOMFORT™ AVEC POSITIONNEMENT TWILIGHT



401 Bridge Street
Old Forge, PA 18518
www.goldentech.com

Cher client,

Nous vous remercions d'avoir acheté ce fauteuil releveur et inclinable de Golden Technologies. Nous nous engageons à fournir à nos clients des fauteuils releveurs de la plus haute qualité, fabriqués par des Américains. Nos fauteuils sont fabriqués à la main à Old Forge, en Pennsylvanie. Nous sommes fiers de produire les fauteuils releveurs préférés de l'industrie - pour votre famille et la nôtre.

Ce produit est fabriqué à partir de composants de la plus haute qualité, il est conçu pour vous offrir un maximum de services avec un minimum d'entretien et il est assorti de la garantie la plus complète de l'industrie. Nous espérons que votre fauteuil Golden vous procurera des années de confort et de plaisir, tout en vous aidant à vous asseoir et à vous lever.

Veuillez prendre quelques instants pour lire ce manuel afin de vous familiariser avec le fonctionnement de ce fauteuil et avec notre garantie. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, veuillez contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce fauteuil.

Veuillez également noter les informations de sécurité suivantes : Ce fauteuil électrique de levage et d'inclinaison est un appareil médical conçu pour vous aider à vous asseoir et à vous relever. Ne laissez jamais les enfants utiliser le fauteuil. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le fauteuil doit rester en position assise.

Encore une fois, nous vous remercions d'avoir choisi ce fauteuil Golden.



Cordialement,

A stylized, handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Richard Golden'.

Richard Golden
Directeur général



Complies with
UL 73 and
CSA C22.2 No. 68

Consignes de sécurité

Les symboles ci-dessous sont utilisés dans le manuel d'utilisation et/ou sur le produit pour identifier les avertissements et vous communiquer des informations importantes en matière de sécurité. Assurez-vous de les lire et de les comprendre dans leur intégralité.



AVERTISSEMENT ! Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves. Cette icône est représentée par un symbole noir sur un triangle jaune avec une bordure noire.



OBLIGATOIRE ! Le non-respect des actions obligatoires peut entraîner des blessures corporelles et/ou endommager l'équipement. Cette icône est représentée par un symbole blanc sur un point bleu avec une bordure blanche.



INTERDIT ! Indique une (des) action(s) qui ne doit (doivent) en aucun cas être effectuée(s). Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures corporelles et/ou endommager l'équipement. Cette icône est représentée par un symbole noir avec un cercle rouge et un trait rouge.

Symboles de sécurité

Les symboles ci-dessous identifient les avertissements, les actions obligatoires et les actions interdites. Ils figurent dans le manuel d'utilisation et/ou sur le produit. Assurez-vous de bien comprendre toutes les étiquettes de sécurité avant d'utiliser le produit. **Ne retirez pas** les étiquettes de sécurité de votre produit.



Lisez et suivez le manuel d'utilisation !



Risque de pincement/écrasement !



Risque d'écrasement d'enfant et/ou d'animal domestique !



Risque d'écrasement du transformateur !




Risque de basculement d'un adulte, d'un enfant et/ou d'un animal domestique !



Risque d'incendie !



Consignes de sécurité

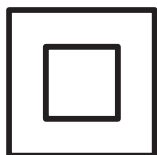


Appareil de classe II !



Utilisation à l'intérieur uniquement !



Ne pas fumer !

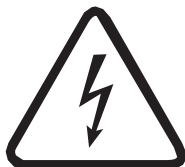

Risque électrique !



Ne pas jeter à la poubelle !



Piles requises !



OBLIGATOIRE

LISEZ D'ABORD CE MANUEL AVANT D'INSTALLER OU D'UTILISER VOTRE FAUTEUIL ÉLECTRIQUE DE LEVAGE ET D'INCLINAISON.

Votre fauteuil électrique de levage et d'inclinaison a été conçu à partir des niveleurs de jambes pour offrir le summum de la solidité et de la fiabilité. Nous avons pris grand soin de vous offrir un confort et une sécurité absolus. Golden Technologies inspecte et teste minutieusement chaque unité avant de l'expédier.

AVERTISSEMENT



Votre fauteuil Golden est un appareil médical. Par conséquent, vous devez être prudent lorsque vous l'utilisez afin d'assurer votre sécurité personnelle et celle de votre entourage. Vous trouverez ci-dessous les règles à suivre pour utiliser votre fauteuil électrique Golden en toute sécurité.



Le déballage de l'appareil doit se faire avec précaution afin de ne pas blesser les personnes et de ne pas endommager l'appareil. Jetez tous les sacs et housses en plastique, car ils peuvent constituer un risque d'étouffement pour les jeunes enfants.



Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques s'approcher du fauteuil lorsqu'il fonctionne.



Ne laissez pas les enfants jouer avec le fauteuil ou le faire fonctionner à tout moment.



La commande manuelle doit être désactivée ou débranchée lorsque le fauteuil n'est pas utilisé.



Ne vous laissez pas tomber dans le fauteuil lorsque vous vous y installez ou lorsqu'il est en position de levage. S'enfoncer dans le fauteuil l'endommagerait et pourrait provoquer des blessures.



Ne laissez personne s'asseoir sur vos genoux, sur le bras du fauteuil ou sur le repose-pieds lorsque vous êtes dans le fauteuil ou que vous l'utilisez, car cela pourrait le faire basculer et entraîner des blessures.



Ne placez pas vos doigts ou vos mains entre le coussin du siège et l'intérieur du bras du fauteuil lorsque vous êtes assis dans le fauteuil ou lorsque le fauteuil est en fonctionnement ou branché à une source d'alimentation.



Ne récupérez pas d'objets tombés à l'intérieur ou sous le fauteuil lorsque celui-ci est branché sur une source d'alimentation.



N'utilisez pas le fauteuil s'il y a des personnes, des animaux ou d'autres obstacles sous ou devant le



repose-pieds, sous le fauteuil ou derrière le fauteuil.

Ne vous placez pas, ne placez pas votre enfant et/ou votre animal de compagnie trop haut sur le fauteuil lorsque le dossier est incliné. Cela peut entraîner un risque de basculement. Assurez-vous que vous êtes correctement équipé pour le fauteuil releveur avant de l'utiliser.



Ne fumez pas lorsque vous utilisez le fauteuil, que vous vous y asseyez ou que vous vous y reposez.



Pour éviter tout risque de choc électrique, n'immergez pas les composants électriques dans un liquide et ne renversez aucun liquide sur les composants électriques. N'ouvrez aucun des composants électriques. Il n'y a pas de pièces réparables.



Toute ouverture des composants électriques par une personne autre qu'un technicien qualifié entraîne l'annulation de la garantie.



Assurez-vous que le fauteuil est placé à la distance spécifiée d'un mur/angle (page 8). Le non-respect de cette consigne peut endommager le fauteuil et entraîner l'annulation de la garantie.



N'utilisez pas de rallonge électrique pour brancher votre fauteuil sur une prise électrique. Veillez à ce que tous les produits électriques et leurs fils soient éloignés de votre fauteuil, car le mécanisme du cadre de levage en métal pourrait les écraser et créer un risque d'incendie et/ou causer des blessures.



N'utilisez pas votre fauteuil releveur si vous êtes en état d'ébriété ou si vous prenez des médicaments qui altèrent vos capacités mentales ou physiques à utiliser le fauteuil en toute sécurité. Consultez votre médecin au sujet des médicaments que vous prenez et qui peuvent affecter la sécurité d'utilisation du fauteuil.



N'utilisez pas ce produit si vous souffrez d'une maladie qui limite ou affaiblit vos capacités mentales ou physiques. Vous devez consulter votre médecin avant d'utiliser ce produit.



Consultez votre médecin concernant l'utilisation de la position de Trendelenburg.



Placer le fauteuil releveur au centre d'une pièce ou trop loin d'un mur crée un risque de trébuchement, car les câbles d'alimentation du fauteuil releveur traversent les principales zones de circulation de la résidence.



Des piles de secours 9 VDC qui fuient peuvent endommager l'équipement. Inspectez et remplacez les piles périodiquement. Lisez les sections "Système de piles de secours" et "Entretien et maintenance" de ce manuel.



Si l'utilisateur du fauteuil releveur est inconscient ou endormi, la commande manuelle peut être activée par inadvertance et forcer l'utilisateur à sortir du fauteuil.

Si vous rencontrez un problème avec le fonctionnement de votre fauteuil releveur électrique, cessez d'utiliser le produit



immédiatement après avoir découvert le problème. Contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté votre fauteuil pour le faire réparer.



Le dépassement de la limite de poids indiquée dans le présent manuel peut entraîner une instabilité du fauteuil releveur et un risque de basculement.

Installation de votre fauteuil releveur Golden Power


Modèles : PR200, PR355M, PR355L, PR401SME, PR401MLA, PR501JP, PR501S, PR501S-23, PR501M, PR501L, PR501T, PR531-PSA, PR531-MED, PR531-LAR, PR531-TAL, PR531-M26, PR531-T28,

PR531-S23, PR931-MED


1. Retirez le transformateur de l'armoire à transformateurs (située derrière le dossier extérieur inférieur) et placez deux piles de 9 volts dans le transformateur comme indiqué. Placez le transformateur sur le sol, derrière le fauteuil.



2. Branchez le transformateur dans une prise de courant alternatif de 115-120V 60Hz et connectez le câble d'alimentation du fauteuil au transformateur comme indiqué. Le câble d'alimentation se trouve sous le fauteuil et est attaché au moteur par un collier de serrage blanc. Retirez l'attache zip, étendez le câble sous et derrière la chaise.

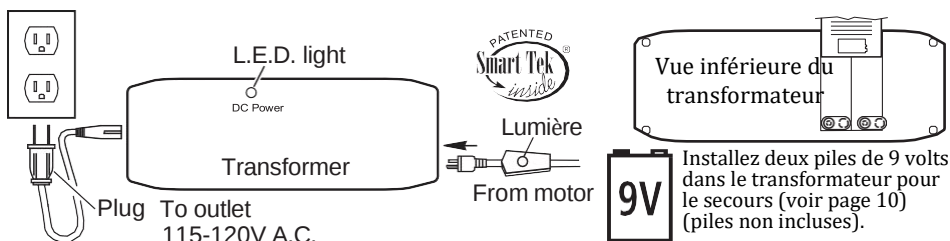

3. Placez le fauteuil à l'endroit désiré dans la pièce, en le maintenant à 21 pouces du mur. Si vous placez le fauteuil dans un coin, maintenez-le à 21" du mur, comme indiqué. Voir le tableau des distances ci-dessous pour votre modèle.

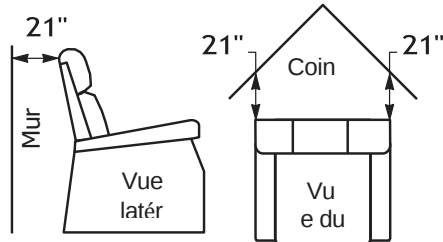

Distance requise par rapport au mur en position allongée

Numéro de modèle	Mur	Coin
PR200	11 in.	11 in.
PR355M	17 in.	17 in.
PR355L	18 in.	18 in.
PR401SME	18 in.	18 in.
RP401MLA	19 in.	19 in.
PR501JP	17 in.	17 in.
PR501S	17 in.	17 in.
PR501S-23	17 in.	17 in.
PR501M	17 in.	17 in.
PR501L	18 in.	18 in.
PR501T	19 in.	19 in.

Numéro de modèle	Mur	Coin
PR501M-26D	17 in.	17 in.
PR501L-26D	18 in.	18 in.
PR501T-28D	19 in.	19 in.
PR531-PSA	16 in.	16 in.
PR531-MED	17 in.	17 in.
PR531-LAR	19 in.	19 in.
PR531-TAL	21 in.	21 in.
PR531-M26	18 in.	18 in.
PR531-T28	21 in.	21 in.
PR531-S23	16 in.	16 in.
PR931-MED	5 in.	5 in.

4. Ajustez les niveleurs de pieds au bas du fauteuil si nécessaire pour mettre le


fauteuil à niveau. Certaines moquettes à poils hauts peuvent gêner le fonctionnement du repose-pieds du fait qu'elles se frottent contre ce dernier. Réglez les niveleurs à une hauteur supérieure à celle des poils.

5. Faites glisser la commande manuelle d'entre le dossier et le bras vers l'arrière du fauteuil. Fixez le cordon dans le serre-câble à dégagement rapide situé au-dessus de la pochette du magazine sur le bras du fauteuil.



Installation de votre fauteuil releveur Golden Power

Modèles : PR501M26, PR501L26, PR501T28, PR531-M26, PR531-T28

1. Installez deux piles alcalines de 9 volts dans le support de piles comme indiqué. Le support de piles est attaché par une fermeture éclair (blanche) à l'arrière du cadre métallique. Retirez l'attache zip, étendez le câble sous et derrière le fauteuil.

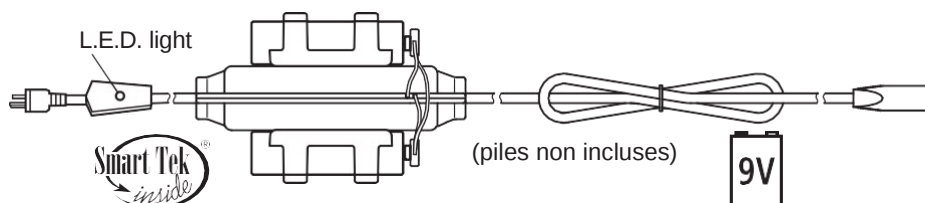

2. Retirez le transformateur de la boîte. Suivez les étapes 1 et 2 de la page 7 pour le raccorder au fauteuil et à la prise secteur.
3. Sortez la commande manuelle de la pochette du chargeur et fixez le cordon dans le serre-câble à dégagement rapide situé au-dessus de la pochette, sur le bras du fauteuil.
4. Installation du dossier : Appuyez sur la flèche vers le bas de la commande manuelle jusqu'à ce que le repose-pieds soit à peu près parallèle au sol. Ceci permet d'exposer les supports de dossier à l'arrière du fauteuil.
5. Faites glisser le dossier entre les supports jusqu'à ce que les goujons filetés du dossier passent dans les trous des supports, comme indiqué.
6. Vissez les écrous de blocage de la bride sur les goujons et serrez fermement à l'aide de la clé fournie ou d'une clé à fourche de 7/16". Remettez le fauteuil en position assise droite en appuyant sur la flèche vers le haut de la commande manuelle.
7. Fixez le bas du dossier extérieur à la bande velcro du rail transversal du bras.

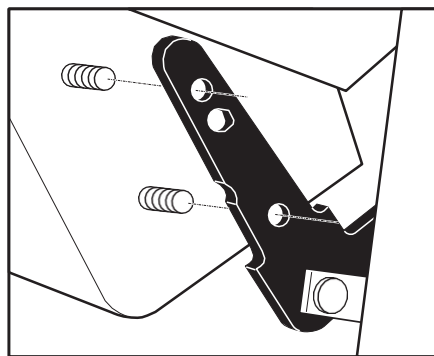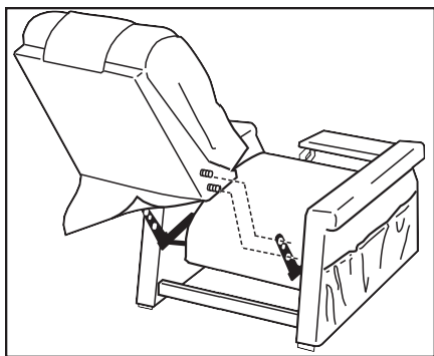


8. Placez le fauteuil à l'endroit souhaité dans la pièce, en le laissant à une distance sûre du mur. Consultez le tableau des distances à la page 7 pour

connaître la distance appropriée par rapport au mur et aux coins.

9. Ajustez les niveleurs de pieds au bas du fauteuil si nécessaire. Certaines moquettes à poil long peuvent gêner le fonctionnement du repose-pieds en s'y frottant. Réglez les niveleurs à une hauteur supérieure à celle des poils.

Fonctionnement des fauteuils releveurs Tous les modèles

1. **Pour incliner votre fauteuil**, appuyez sur le bouton d'inclinaison (S2) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous atteigniez la position souhaitée. Relâchez ensuite le bouton.
2. **Pour revenir en position assise à partir de l'inclinaison**, appuyez sur le bouton de montée (S1) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le fauteuil revienne en position assise fermée. Relâchez ensuite le bouton.
3. **Pour rehausser votre fauteuil**, appuyez sur le bouton de montée (S1) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que vous atteigniez la hauteur souhaitée. Relâchez ensuite le bouton.
4. **Pour revenir à la position assise après la levée**, appuyez sur le bouton d'abaissement (S2) et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le fauteuil revienne à la position assise au sol. Relâchez ensuite le bouton.
5. **Pour relever le fauteuil depuis la position inclinée**, appuyez sur le bouton de montée (S1) et maintenez-le enfoncé. Le fauteuil continuera à dépasser la position assise et commencera à se relever. Relâchez le bouton lorsque le fauteuil atteint la hauteur souhaitée.
6. **Pour incliner votre fauteuil à partir de la position relevée**, appuyez sur le bouton d'abaissement (S2) et maintenez-le enfoncé. Le fauteuil continuera à dépasser la position assise et commencera à s'incliner. Relâchez le bouton lorsque le fauteuil atteint la position inclinée souhaitée.
7. **S'installer dans le fauteuil**. En vous tenant à côté de votre fauteuil, appuyez sur le bouton d'élévation du fauteuil (S1) et élevez le fauteuil à une hauteur à laquelle vous pouvez vous asseoir. Cette hauteur varie d'une personne à l'autre en fonction de ses besoins. Levez le fauteuil suffisamment haut pour ne pas avoir à vous y affaler. **Le fait de se laisser tomber dans le fauteuil l'endommagera et risque de provoquer des blessures.** Appuyez sur le bouton d'abaissement du fauteuil (S2). Lorsque le fauteuil continue à descendre, ajustez-vous dans une position qui vous est confortable. Continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le fauteuil soit en position assise (le fauteuil repose fermement sur le sol), puis relâchez le bouton.
8. **Pour vous lever de votre fauteuil**, appuyez sur le bouton de relevage de la chaise (S1) et levez la chaise à une hauteur qui vous permet de vous tenir debout facilement. Relâchez le bouton. Après vous être levé du fauteuil, remettez-le en position assise (le fauteuil est fermement posé sur le sol) afin que les enfants, les animaux domestiques ou les obstacles ne puissent pas

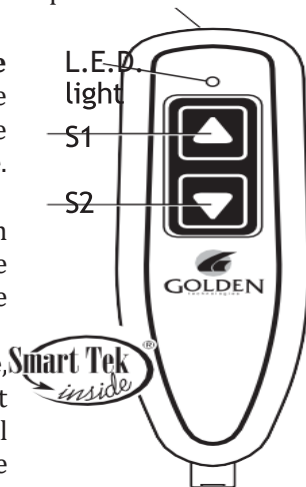

se glisser sous le fauteuil.

Remarque : Votre fauteuil Golden peut être arrêté à tout moment pendant l'élévation ou l'inclinaison en relâchant le bouton sélectionné, vous offrant ainsi une large gamme de positions confortables. Sélectionnez la position qui vous convient le mieux. Le moteur est réglé pour s'arrêter lorsqu'il atteint sa position d'extension ou de rétraction complète si le bouton sélectionné n'est pas relâché. Si vous dépassez la position souhaitée, appuyez sur le bouton pour revenir à la position souhaitée. Vous pouvez répéter ce processus aussi souvent que vous le souhaitez.

Avertissement concernant l'USB : le port de charge USB fourni est uniquement destiné à être utilisé avec des appareils intelligents appropriés tels que des téléphones ou des tablettes. Veuillez vous référer aux exigences de charge du fabricant de l'appareil avant de l'utiliser. Golden Technologies décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de données concernant le dispositif de chargement sur un ordinateur ou un autre appareil électronique connecté au port USB.

Système de pile de secours

Votre fauteuil releveur électrique Golden est équipé d'un système de pile de secours qui permet au fauteuil de revenir en position assise en cas de panne de courant domestique. Les piles ont suffisamment d'énergie pour ramener le fauteuil en position assise à partir de la position d'inclinaison. *Les piles n'ont pas assez d'énergie et ne sont pas conçues pour faire fonctionner le fauteuil pendant une période prolongée en l'absence de tension domestique standard (120 volts, 60 Hz).* **Les piles doivent être remplacées après une utilisation.** Les piles doivent être changées tous les ans. (Voir l'installation page 7 et 8.)

Smart Tek™ (Indication de puissance)

Votre fauteuil releveur électrique est équipé d'une commande manuelle rétroéclairée indiquant l'alimentation de la commande manuelle.

Votre fauteuil releveur électrique est également équipé d'un voyant d'alimentation sur le transformateur et sur le cordon d'alimentation reliant le moteur au transformateur. Les voyants s'allument en vert en permanence, indiquant que le transformateur et le moteur sont alimentés par la prise de courant. Les voyants ont été prévus pour vous aider à identifier les déconnexions électriques, le cas échéant, et pour aider votre fournisseur à diagnostiquer les problèmes électriques, le cas échéant.

Si le fauteuil ne fonctionne pas et que les lumières sont éteintes, vérifiez toutes les connexions électriques du fauteuil. Assurez-vous que tout est correctement connecté et que la prise de courant dans laquelle le fauteuil est branché est alimentée (voir l'installation à la page 8 pour les connexions électriques). **Si vous rencontrez un problème dans le fonctionnement de votre fauteuil releveur électrique alors que les voyants sont allumés, par exemple un problème mécanique ou si l'un des voyants est éteint, cessez d'utiliser le produit dès que vous découvrez le problème.** Contactez le fournisseur auprès duquel vous avez acheté votre fauteuil. Il sera en mesure de résoudre les problèmes et de s'occuper du service après-vente de l'usine si nécessaire. Vous devrez être prêt à répondre à certaines questions de base concernant votre fauteuil releveur, telles que le modèle et le numéro de série. Ces derniers se trouvent au dos de la commande manuelle et à l'arrière du châssis du fauteuil. Votre fournisseur vous posera des questions sur les voyants d'alimentation, par exemple sur celui qui est éteint. Avant d'appeler votre fournisseur, vérifiez toutes les connexions électriques du fauteuil. Assurez-vous que tout est correctement connecté et que la prise de courant dans laquelle le fauteuil est branché est alimentée (voir l'installation à la page 8 pour les connexions électriques).

GARANTIE LIMITÉE À VIE ET À SEPT ANS POUR LE CONSOMMATEUR

GOLDEN, par l'intermédiaire de son distributeur/service après-vente agréé, garantit ce fauteuil au consommateur initial uniquement, contre tout défaut de matériau ou de fabrication, comme suit :

GARANTIE LIMITÉE DU MÉCANISME DE FAUTEUIL RELEVEUR, DU MÉCANISME D'INCLINAISON ET DU CHÂSSIS DU FAUTEUIL

GOLDEN garantit, pour la durée de vie du fauteuil, la réparation ou le remplacement, au choix de Golden, du mécanisme releveur, du châssis du fauteuil et du mécanisme d'inclinaison. La main-d'œuvre pour le remplacement de ces pièces est couverte sur tous les modèles pendant trois ans.

GOLDEN n'est pas responsable des frais d'examen des pièces garanties et n'est pas tenue de payer les frais de transport, de manutention et d'emballage des pièces ou des composants.

GARANTIE DE TROIS ANS SUR LES PIÈCES ÉLECTRIQUES

GOLDEN garantit les pièces électriques de ce fauteuil contre toute défectuosité pour le consommateur d'origine uniquement, pour une période de trois ans à compter de la date d'achat par le consommateur. GOLDEN n'est pas responsable des coûts ou dépenses liés à la vérification des pièces garanties et n'est pas tenu de payer les frais de transport, de manutention et d'emballage des pièces ou des composants.

GARANTIE LIMITÉE DES PIÈCES ÉLECTRIQUES DE LA QUATRIÈME À LA SEPTIÈME ANNÉE

Pendant la période commençant à l'expiration de la garantie complète de trois ans sur les pièces offerte ci-dessus et se poursuivant jusqu'à la septième année après la date d'achat initial par un consommateur, GOLDEN garantira les pièces électriques au prorata de la base suivante. Une remise de 35 % sur le prix de vente suggéré est accordée après la 4e année. 25 % de réduction pour la 5e année. 15 % pour la 6e année et 5 % pour la 7e année. À titre d'exemple, une pièce coûtant 100,00 \$ et devant être remplacée au cours de la 4e année coûterait 65,00 \$. GOLDEN n'est pas responsable ou obligé de payer les coûts ou les dépenses pour la vérification et/ou l'entretien de toute pièce garantie ou de payer les coûts de transport, de manutention et d'emballage des fauteuils et/ou des pièces ou des composants.

CONDITIONS APPLICABLES À LA GARANTIE

GOLDEN réparera et/ou remplacera, à sa discrétion, les pièces et/ou composants défectueux à condition que les pièces sous garantie non pas été mal utilisées, abusées ou mal entretenues par le consommateur, qu'elles n'aient pas été endommagées pendant le transport ou la manutention et/ou qu'elles n'aient pas été modifiées ou réparées par des représentants non agréés. Cette garantie ne couvre pas les coûts des appels de service inutiles, c'est-à-dire les appels de service à domicile dans le seul but d'éduquer le consommateur sur le produit, ou de trouver une connexion électrique insatisfaisante, etc. Le dépassement de la capacité de charge du fauteuil entraîne l'annulation de la garantie. L'ombrage du tissu ne peut être garanti pour les pièces de rechange ou les chaises de remplacement.

Jr. Petits modèles	300 lbs.	Capri	325 lbs.
Modèles moyens, larges et grands	375 lbs.	Cambridge.....	375 lbs.
Modèle large S23"	375 lbs.	PR931-MED	350 lbs.
Modèles à deux moteurs de 26" et 28" de large	500 lbs.		

Dans le cas où le produit ne serait pas conforme à cette garantie, Golden corrigera le défaut conformément à la garantie limitée de sept ans et à la garantie à vie du consommateur. LA GARANTIE LIMITÉE À VIE ET À SEPT ANS ÉNONCÉE CI-DESSUS EST LA SEULE ET ENTIÈRE GARANTIE RELATIVE AU PRODUIT ET REMPLACE ET EXCLUT TOUTE AUTRE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, QU'ELLE SOIT EXPRESSE, IMPLICITE OU DÉCOULANT DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FINALITÉ PARTICULIÈRE. CETTE GARANTIE NE COUVRE NI NE PRÉVOIT LE REMBOURSEMENT OU LE PAIEMENT DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS.

GOLDEN ne peut être tenue responsable de tout dommage ou perte accessoire ou consécutif non prévu par la présente garantie.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui peuvent varier d'un état à l'autre.

Toutes les demandes de garantie doivent être approuvées par Golden Technologies avant

toute intervention. La garantie est valable dans les 50 états, les provinces canadiennes et à Porto Rico

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Votre fauteuil releveur nécessite des contrôles d'entretien de routine. Vous pouvez effectuer certains de ces contrôles, tandis que d'autres peuvent nécessiter l'aide d'un fournisseur. En respectant ces contrôles d'entretien, vous pouvez vous assurer que votre fauteuil releveur fonctionnera sans problème pendant des années. Si vous avez des questions ou des inquiétudes concernant l'entretien de votre fauteuil releveur, contactez votre prestataire.

- ✓ Avant de nettoyer votre fauteuil releveur, consultez votre fournisseur pour connaître les types de nettoyeurs et les méthodes de nettoyage appropriés.
- ✓ Veillez à ce que tous les composants électriques soient à l'abri de l'humidité et des liquides renversés.

Destiné à un usage intérieur uniquement.

- ✓ Inspectez régulièrement tous les faisceaux de câbles pour vous assurer qu'ils ne sont pas coupés, endommagés, effilochés ou déconnectés. En cas de dommage, quel qu'il soit, débranchez le fauteuil releveur et contactez votre fournisseur.
- ✓ Vérifiez périodiquement le serrage, l'usure et la corrosion de toutes les fermetures. Si l'un de ces éléments est p



Avertissement : Faites attention aux points de pincement et aux pièces métalliques tranchantes (portez des gants).



GARANTIE D'OR D'ULTRAFABRIQUES Q&R

Voici quelques réponses aux questions les plus fréquemment posées :

Qu'est-ce que le délaminage ?

Le délaminage est une rupture dans un matériau stratifié, souvent un composite, qui conduit à la séparation des couches de renforcement ou des plis. La rupture par décollement peut être de plusieurs types, notamment

- Rupture de l'adhésif ou de la résine
- Fracture dans le matériau de renforcement
- Décollement de la résine du renforcement

De Ultrafabrics : Notre technologie exclusive Takumi™ constitue l'ADN de chaque rouleau sortant de notre usine. Perfectionné en permanence, Takumi est le seul procédé capable d'atteindre la qualité supérieure des Ultrafabrics. Ce procédé innovant permet d'obtenir des performances maîtrisées directement dans les quatre couches - en les combinant en un système unifié qui assure une force d'adhérence et une longévité durables.

Qu'est-ce que le Crocking ?

Le crocking se produit lorsque l'excès de colorant déteint d'un tissu sur un autre tissu. Le frottement du colorant d'un tissu résulte d'une pénétration ou d'une fixation insuffisante du colorant, de l'utilisation de colorants ou de méthodes de teinture inappropriés ou d'un lavage et d'un traitement insuffisants après l'opération de teinture. Le crocking peut se produire dans des conditions humides ou sèches.

De Ultrafabrics : Nos produits ne se décolorent pas. Nous n'utilisons pas de colorant dans notre processus de fabrication. La couleur est obtenue en mélangeant la couleur dans le revêtement supérieur en polyuréthane, puis en laminant le revêtement à la couche de mousse, créant ainsi un système unifié.

Qu'est-ce que la décoloration ?

La décoloration fait référence à la diminution de la couleur ou des tons, généralement causée par une exposition excessive à la lumière. Les rayons ultraviolets peuvent rompre les liaisons chimiques et ainsi estomper les couleurs d'un objet - c'est un effet de blanchiment. Certains objets sont plus susceptibles de se décolorer, comme les textiles teints et les aquarelles. D'autres objets reflètent davantage la lumière, ce qui les rend moins susceptibles de se décolorer.

De Ultrafabrics : Les produits Ultrafabrics sont fabriqués selon la méthode de test AATCC

16.3. Ce test mesure la solidité des couleurs d'un produit à la lumière pour les applications intérieures. Nos produits satisfont ou dépassent les 200 heures d'exposition directe à une source de lumière Xenon Arc.

Qu'est-ce qui est couvert par la garantie de fabrication

d'Ultrafabrics ?

Le type de garantie le plus courant sur les produits est la garantie que le produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication. Cela signifie simplement qu'Ultrafabrics a correctement construit le produit, avec des matériaux appropriés, et implique que les produits fonctionneront aussi bien que les produits habituels.

Notes

Notes

Notes

GOLDEN PRODUCT REGISTRATION

Register Now To Lock In Your Warranty and Receive Important Product Updates

SAVE TIME - REGISTER ONLINE: WWW.GOLDENTECH.COM

SERIAL NUMBER

*Most Lift Chairs Have On Controller Wire or Back Rail of the Metal Frame
Most Scooters & Powerchairs On Seat Post, Under/On Battery, or Under Carpet*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PRODUCT MODEL NUMBER

*Most Lift Chairs Start with PR (PR401, PR510, etc).
Most Scooters with G (GA, GB, GC, GL, GR, etc) Most Powerchairs with GP*

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PURCHASE DATE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

FIRST NAME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAST NAME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADDRESS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADDRESS LINE 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CITY

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STATE / PROVINCE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZIP / POSTAL CODE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

E-MAIL ADDRESS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROVIDER NAME

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROVIDER'S ADDRESS

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ADDRESS LINE 2

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CITY

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

STATE / PROVINCE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ZIP / POSTAL CODE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

COUNTRY

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Product comments:

Rate Provider Experience (Circle One - 1 Bad, 5 Great)

1 2 3 4 5



GOLDEN TECHNOLOGIES
401 BRIDGE ST
OLD FORGE PA 18518-2323



En savoir plus sur ces produits de mobilité fine également disponibles auprès de Golden Technologies



Si vous êtes à la recherche d'un scooter portable idéal et plein de style, ne cherchez pas plus loin que le Buzzaround XL !
Pouvant supporter un poids de 300 livres, le Buzzaround XL se démonte rapidement et facilement.



Rien n'égale le luxe de la gamme de scooters Golden Companion ! La gamme Companion est dotée d'un timon réglable breveté, de feux avant et arrière brillants et d'un siège confortable. Capacités de poids de 350 et 400 livres



Le fauteuil électrique Golden Compass Sport est le fauteuil électrique idéal pour les consommateurs qui recherchent la maniabilité dans les espaces intérieurs restreints, avec un châssis articulé sans ressort breveté et une véritable technologie de roue motrice centrale pour parcourir les grands espaces extérieurs.



Pour vos dossiers

Veuillez indiquer ci-dessous les informations relatives à votre fauteuil releveur et inclinable. Ces informations vous seront utiles au cas où vous auriez besoin de contacter Golden Technologies, Inc. au sujet de votre fauteuil releveur.

Date d'achat _____

Modèle _____

Numéro de série _____

Votre représentant ou fournisseur de Golden Technologies, Inc.

Nom _____

Société _____

Adresse _____

AVERTISSEMENT

Ne laissez pas les enfants jouer sur ce meuble mécanisé ou actionner le mécanisme.

Le repose-jambes se rabat lors de la fermeture, de sorte qu'un enfant pourrait se blesser.

Laissez toujours le fauteuil en position assise. N'approchez pas les mains et les pieds du mécanisme. Le mécanisme ne doit être actionné que par son utilisateur.

